



ローコストで確かな洗浄効果。

洗浄・除菌システム

ミーレ ジェットウォッシャー G7831/G7881



タンパク質(血液・唾液)の洗浄に適しています。
使用する水量はわずか39L、経済的な洗浄機です。


高い洗浄効果

タンパク質(血液・唾液)が凝固しない55℃の温水で洗浄[※]。どなたが操作しても同様の洗浄効果が得られます。




簡単操作

使用済みの器具をセットし、洗浄プログラムを選択してスタートボタンを押すだけの簡単操作。スタッフを煩わしく危険な作業から解放します。

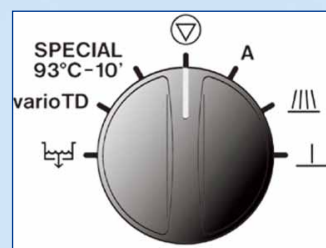

ローコスト

3枚の洗浄羽根と循環ポンプで効率的に洗浄。槽内の上中下に配された洗浄羽根が洗浄槽内をくまなくスプレーします。さらにポンプによる洗浄水循環で消費水量はどちらのタイプも39L[※]と経済的です。また蒸気を処理する機構内蔵で排気ダクトが必要ありません。

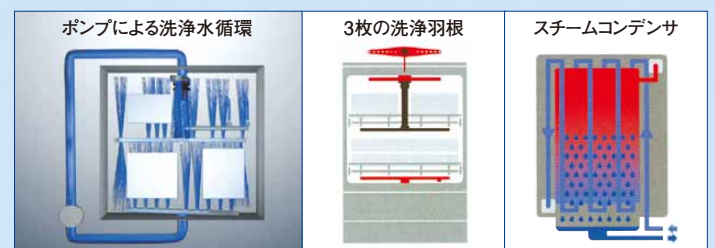

※洗浄プログラム vario TD の場合

簡単操作で高レベルの洗浄が行えます。



選べる4つのプログラム

●プログラム vario TD

タンパク質が凝固しない温度55°Cで水洗・弱アルカリ性洗剤を使用した洗浄・すすぎをし、その後93°Cで5分間のすすぎ/除菌を行います。

多量の血液に汚れた器具類に効果的です。

[プログラム所要時間:約55分]

●プログラム UNIVERSAL

汚れの程度が普通で血液汚れが少ない場合に、除菌なしで洗浄するプログラムです。

[プログラム所要時間:約35分]

●プログラム SPECIAL 93°Cで10分間

血液汚れが少ない場合に、93°Cで10分間洗浄および除菌を行うプログラムです。

[プログラム所要時間:約50分]

●プログラム A


洗浄温度やすすぎ時間などを自由に設定できるプログラムです。



G7881

G7831

簡単操作

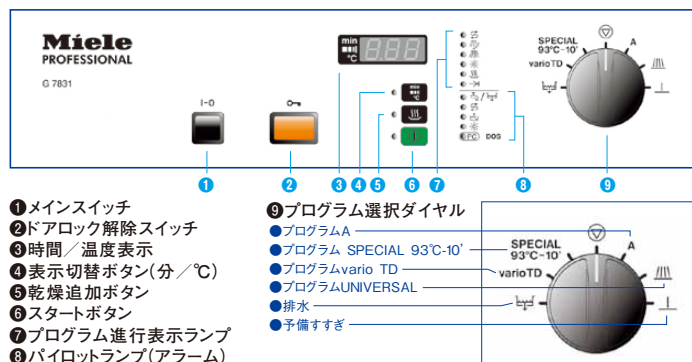

- ①メインスイッチ
- ②ドアロック解除スイッチ
- ③時間/温度表示
- ④表示切替ボタン(分/°C)
- ⑤乾燥追加ボタン
- ⑥スタートボタン
- ⑦プログラム進行表示ランプ
- ⑧パイロットランプ(アラーム)

⑨プログラム選択ダイヤル

- プログラムA
- プログラム SPECIAL 93°C-10'
- プログラムvario TD
- プログラムUNIVERSAL
- 排水
- 予備すすぎ

	G7881	G7831
外形寸法	W600×D600×H850mm	W450×D600×H850mm
	H: 天板付き 850mm、天板なし 820mm	
洗浄槽寸法	W535×D500×H500mm	W362×D474×H560mm
電源・電圧	3相200V 50Hzまたは60Hz 20A	単相200V 50Hz/60Hz共通 20A
重量	約70kg	約58kg
循環ポンプ能力	400L/分	200L/分

OPTION ◎オプション 写真のインストルメント、トレイ類は付属していません。

<p>●上段バスケット</p>	<p>●下段バスケット</p>	<p>●メッシュトレイ</p>	<p>●トレースタンド</p>		
<p>●インストルメントスタンド</p>	<p>●鉗子スタンド</p>	<p>●ファイルスタンド</p>	<p>●メッシュバスケット</p>	<p>●マイクロインストルメントトレイ</p>	<p>●トレースタンド</p>

●一般的名称:器具除染用洗浄器 ●届出番号:G7831/13B3X00018000010 G7881/13B3X00018000009
 ※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで

株式会社ヨシダはISO9001とISO13485を取得しています。
 詳しくはヨシダホームページをご覧ください。http://www.yoshida-dental.co.jp

