

Air Space Dry Conditioner

1 plus 1
equal 1

1台で2台分の実力。

1台で2台分をサポート。



独立プログラム2槽式
エアスペース加熱方式ドライコンディショナー

てきおん君カートリッジ

温度変化に敏感な寒天印象材をボイル・保存するためには、均一な温度分布と正確な温度コントロールが要求されます。ヨシダのてきおん君・カートリッジは、エアスペース加熱方式とマイクロプロセッサコントロールによる温度制御で、寒天にやさしく、寒天の性能を引き出します。さらに2槽式・大容量ですから、使いやすい寒天コンディショナーです。

単独プログラムで使い分け可能な2槽構造。 1度に20本のカートリッジをボイル・保存。



独立プログラムで使える2槽構造



2槽でそれぞれ異なる温度・ボイル時間が、フルオートマチックでご使用いただけます。
※但し、独立プログラムは、フリープログラムモード(P0)のみのご使用となります。



アップ・ダウンスイッチ 予約タイマー プログラム設定スイッチ 切換スイッチ

均一に加熱するエアースペース加熱方式

カートリッジの周囲にエアースペースを設けてあるので、カートリッジがヒーターブロックに直接接触することなく寒天をムラなく均一に加熱・保存できます。

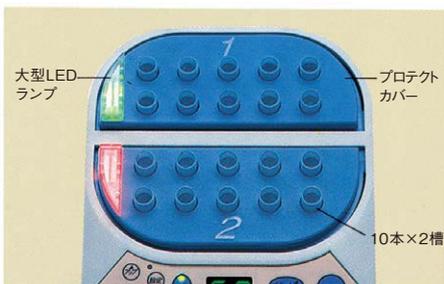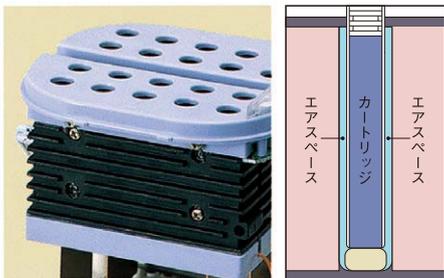

プログラムを選ぶだけの簡単操作


6つのプログラムをあらかじめ記憶していますので、操作は簡単。またフリープログラムモードなら、1槽・2槽を異なるプログラムでご使用いただけます。

プログラム	ボイルング	設定温度
P0	フリープログラム1~60min 1・2槽単独30~80℃	
P1	12min	60℃
P2	10min	60℃
P3	12min	58℃
P4	10min	58℃
P5	12min	56℃
P6	10min	56℃

※但しP1とP3をそれぞれ1槽・2槽で使用するなど、番号違いのプログラム設定はできません。
※室温が高い場合、30℃近くの設定温度はコントロールできません。

一目でわかる大型工程表示

遠くからでも認識できる大型LEDランプを採用。作業工程が一目でわかります。

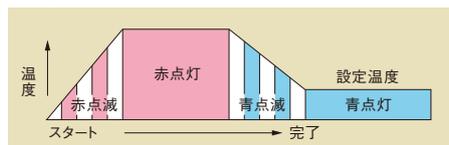

20本OKの 大容量カートリッジ槽

一度に20本のカートリッジをボイル・保存可能。しかもコンパクトサイズです。

プロテクトカバー付きの 安全構造

槽の加熱金属用ブロックには表面にプロテクトトップカバーが付いているので、取り出しの際も安心です。

便利な99時間タイマー

99時間前から予約が可能ですから、休日明けの診療にあわせてセットできます。

てきおん君カートリッジの仕様	
本体寸法	W120×D140×H120mm
本体重量	1.2kg
電源	AC100V・50/60Hz
予約タイマー	99時間
ユーザープログラム	6
フリープログラム	1
カートリッジ本数	20本
標準価格	99,500円
一般的名称	歯科材料加温器
販売名	てきおん君カートリッジ TEC-16型
届出番号	14B2X90011000002(一般)

独立プログラム2槽式
エアースペース加熱方式ドライコンディショナー
てきおん君カートリッジ

関連商品

<p>てきおん君 温風タイプ シリンジにもカートリッジにも使えます。</p> <p>標準価格 99,800円</p> <p>●一般的名称: 歯科材料加温器 てきおん君 TEC-15型 ※寒天印象材・シリンジ等は別売です 届出番号:14B2X90011000001(一般)</p>	<p>紫陽花 カートリッジタイプ 寒天印象材カートリッジタイプ</p> <p>標準価格 5,500円(48本入)</p> <p>●一般的名称: 歯科用寒天印象材 ファインハイドロスティック・紫陽花 カートリッジタイプ 認証番号:219AFBZX00082000(管理)</p>	<p>ハイドロスティックブルー カートリッジ 寒天印象材カートリッジタイプ</p> <p>標準価格 4,800円(48本入)</p> <p>●一般的名称: 歯科用寒天印象材 ハイドロスティック・ブルーN カートリッジタイプ 認証番号:219AFBZX00072000(管理)</p>	<p>リーガルグリーン カートリッジ 寒天印象材カートリッジタイプ</p> <p>標準価格 5,800円(48本入)</p> <p>●一般的名称: 歯科用寒天印象材 ハイドロスティック・リーガルグリーン カートリッジタイプ 認証番号:219AFBZX00076000(管理)</p>
--	---	--	--

カタログ掲載の商品仕様は、改良等により予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。価格は2016年1月現在。消費税は含まれておりません。

禁無断転載

●取り扱い店名

●発売元 / 株式会社 **ヨシダ** <http://www.yoshida-dental.co.jp>
〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 ☎ 03-3845-2931(器材部直通)
●製造販売元 / 藤栄電気(株)横浜工場 神奈川県横浜市都筑区大丸26



(01)02747937014141

2016年1月/PRO/20/@20/改