

マイ
ブラシハンドピース

Yully
for PMTC

ユリー

サブソニックブラシシステム



わ・た・しオンリーのブラシハンドピース。

サブソニック振動を効率よく伝えるようになり、清掃力がアップ^{※1}した「ユリー」。
ブラシ専用だからブラシの特性を最大限に発揮します。

ハイジニストをターゲットに新開発したハンドピースは、細めで軽く使いやすいので
長時間の治療にかかる手の負担を軽減します。

※1:当社他製品

サブソニックによる洗浄効果。

注水下で水流と振動の音波効果（サブソニック振動）によって起きる泡により、バイオフィルムの破壊や洗い流し作用を生かしたプラーク除去、無水下でポリッシングペーストを使用した細部のステイン除去等、幅広い診療に使用できます。



ユリーブラシ専用ハンドピース。

ユリーはブラシ専用設計なので、操作も見た目もシンプル。ユリーなら面倒な調整はいりません。手になじむ形状と軽いハンドピース。歯面へのアクセスも良好で、より手軽にご使用いただけます。



	ユリー	当社他製品
重量(g)	60	73
パワー調整	不要	要
空気手元圧力(MPa)	0.3	0.3
空気消費量(L/min)	23	23
冷却水圧力(MPa)	0.2	0.2
冷却水量(ml/min供給時)	34	29
ヘッド角度(°)	110	130

Yully

for PMTC

各種パーツは滅菌可能。

本体はシリコングリップを装着したままオートクレーブ滅菌可能です。但し乾燥工程にはかけないでください。

※ユリーブラシは10回程度が目安です。



使いやすい角度のブラシチップ。

垂直に近いヘッド角度により、最後臼歯遠心部や隅角部など、さまざまな部位にアクセスしやすくなりました。



カラフルなグリップ。


3色のシリコングリップを標準装備。個々のハイジニストそれぞれがMyハンドピースを認識できます。



●標準カラー:ピンク・イエロー・グリーン
●オプションカラー:ブルー・ブラウン



デンタルハイジニストのPMTC処置を効率よくサポート。
使いやすさとパワーが自慢の「ユリー」です。

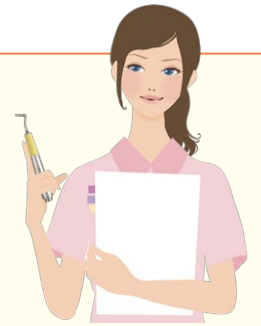

サブソニック振動によって発生する泡の効果で、
より安全に細部に届き、繊細なパワーでプラークを容易に除去できます。
初心者の方から熟練した方まで効率的な治療が可能です。


辺縁歯肉部の洗浄



知覚過敏
根面露出部の清掃



シーラント充填前の
裂溝清掃

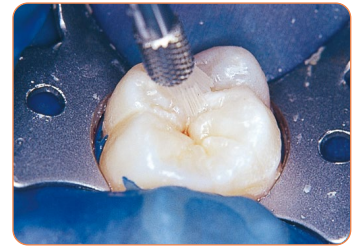

粘膜についた
歯垢染色剤の除去



歯肉溝内部分の
余剰セメント除去



メンテナンス
(ラミネートベニア装着)



義歯のクリーニング




根面板周囲の洗浄



矯正装置のプラーク除去



インプラント術後の
アバットメント清掃

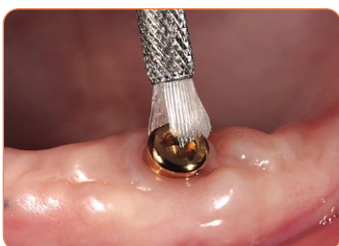

ボーンアンカーブリッジの
メンテナンス



口腔内の状況に合わせて
選べる4つのタイプ



● Fブラシ小・大
平滑面の清掃に
適しています。



● Mブラシ小・大
歯肉溝や隣接面及び
小窩裂溝の清掃に
適しています。

コア接着時における根管口の洗浄や
レーザー治療の際など
ドクターの治療にもお役に立ちます。



コア接着のための
根管口洗浄



レーザー治療の後処理



修復物装着前の清掃



カラフルなシリコングリップ


オートクレーブ滅菌対応のカラフルなシリコン製のグリップです。
各ハイジニストに合わせて色を変えることができます。

- ①ピンク②イエロー③グリーン(以上3点はセットに標準装備)
- ④ブルー(オプション)⑤ブラウン(オプション)

●標準価格:シリコングリップ単品(3個入)各2,100円



ユリー標準セット内容

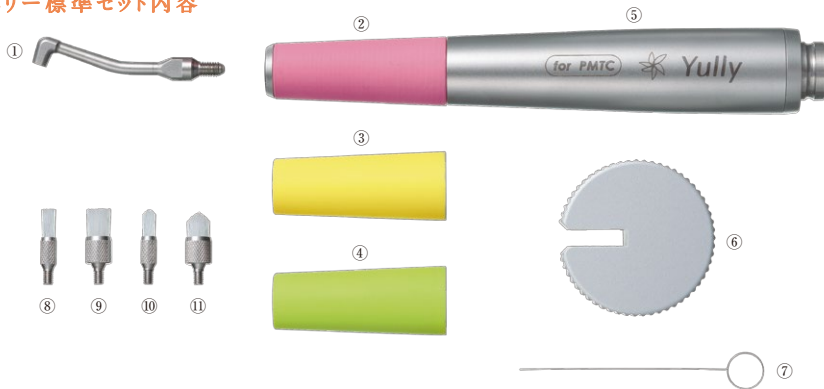

- ①ユリーブラシチップ②③④シリコングリップ⑤ハンドピース本体⑥ユリーブラシチップレンチ
- ⑦ユリーブラシチップクリーニングワイヤー⑧⑨⑩⑪ユリーブラシ(各5個入)

●一般的な名称:歯科用エアスケーラ●販売名:ユリー ●認証番号:226AKBZX00111000(管理医療機器 特定保守管理医療機器)
●標準価格:ユリー・ユリー-ST各118,000円

ユリーブラシ(歯面清掃用ブラシ)※実寸大



- ①ユリーFブラシ小…フラット型、直径3mm
- ②ユリーFブラシ大…フラット型、直径5mm
- ③ユリーMブラシ小…山型、直径3mm
- ④ユリーMブラシ大…山型、直径5mm

●標準価格:ユリーブラシ単品(5個入)各3,100円

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで