

歯科用吸引管

カニユーレ



Powerful
but
Quiet

カニューレ

1

Powerful but Quiet

空気抵抗の少ない形状で
強力かつ静音*での吸引が
可能です。

*ドイツ フラウンホーファー研究機構試験より



2

Colorful

滅菌のタイミングごとに色を分けることができるため、
使用されなかった器具がキャビネット等に
残ってしまうことを防ぎます。

3

No edges

患者さんに痛みを与えにくい
滑らかなラウンド形状です。
頬粘膜・舌の排除がしやすい
デンタルミラーに似た先端形状です。



※カニューレプロテクトと比較→

Instruction

エアロゾルが発生するところにカニューレを置き吸引します。



上顎左側臼歯部 下顎右側臼歯部 下顎前歯部 上顎前歯部

小児やお口の小さな患者さんには、
ヘッドが小さくネックが細い
ペティートがおすすめです。

上：カニューレプロテクト
下：カニューレペティート小児用φ16→

Lineup

■ グレー ■ イエロー ■ ピンク ■ ブルー ■ ターコイズ

共通 強力吸引 静音 ゴムチップ不要 134°C



φ16mm
[カラー:3色、同色5本入]
標準価格 4,800円

カニューレ プロテクト



φ16mm
[カラー:5色、同色5本入]
標準価格 4,800円

カニューレ ユニバーサル



φ16mm 小児用 溝あり
[カラー:5色、同色5本入]
標準価格 4,200円

カニューレ ペティート小児用φ16



φ11mm 小児用
[カラー:3色、同色5本入]
標準価格 4,200円

カニューレ ペティート小児用φ11



カニューレ プロフィラシス



φ16mm パウダー吸引用
[カラー:グレーのみ、4本入]
標準価格 4,800円

- ・バキューム口が広く、先端角度を変えられます。
- ・強力な吸引力で、歯面清掃時のパウダー吸引に適しています。

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

- カニューレは高圧蒸気滅菌器(134°C)で滅菌します。お手入れの際はプロフィラシスの先端部分を取り外します。※乾燥工程不可。
- 使用後は、デュールデンタル製除菌液「D213インストゥルメント」で洗浄除菌をします。
- 洗浄除菌が終わりましたら、カニューレの中の状態を目視確認します。付着物などがある場合は、ブラシで除去し、よくすすいで乾燥させます。
- 滅菌の際、金属に当たらないように注意してください。カニューレは、患者さんの粘膜や皮膚組織に直接触れる器具(セミクリティカルBに分類)であるため、適切な洗浄・除菌・滅菌を行う必要があります。

販売名:バキュームチップ 一般的名称:歯科用吸引管 認証番号:228AGBZX00100000(管理) 製造販売元:株式会社ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9 ※カニューレの販売名はバキュームチップです。

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで



(01)02747937015599