

ヨシダ ユニット 簡易点検のご案内

ユニットを安心してご使用いただくために・・・

平素は(株)ヨシダユニットをご愛用いただき有難うございます。
この度、ユニットD I系(タービン・マイクロモーター・スケーラー・トリプルシリンジ)
給水回路の点検を主としたサービスをスタートいたしました。
内容をご確認いただき、ぜひご検討ください。

【ヨシダユニット簡易点検コース】

対象：ヨシダユニット


※設置後10年未満

内容：給水確認（水圧・水漏れ・消耗品交換）
除菌水フィルター『ユニポア』交換
水回路点検

※点検内容は裏面をご確認ください。



点検料金： ¥ 26,800- /台 (税別) 年1回

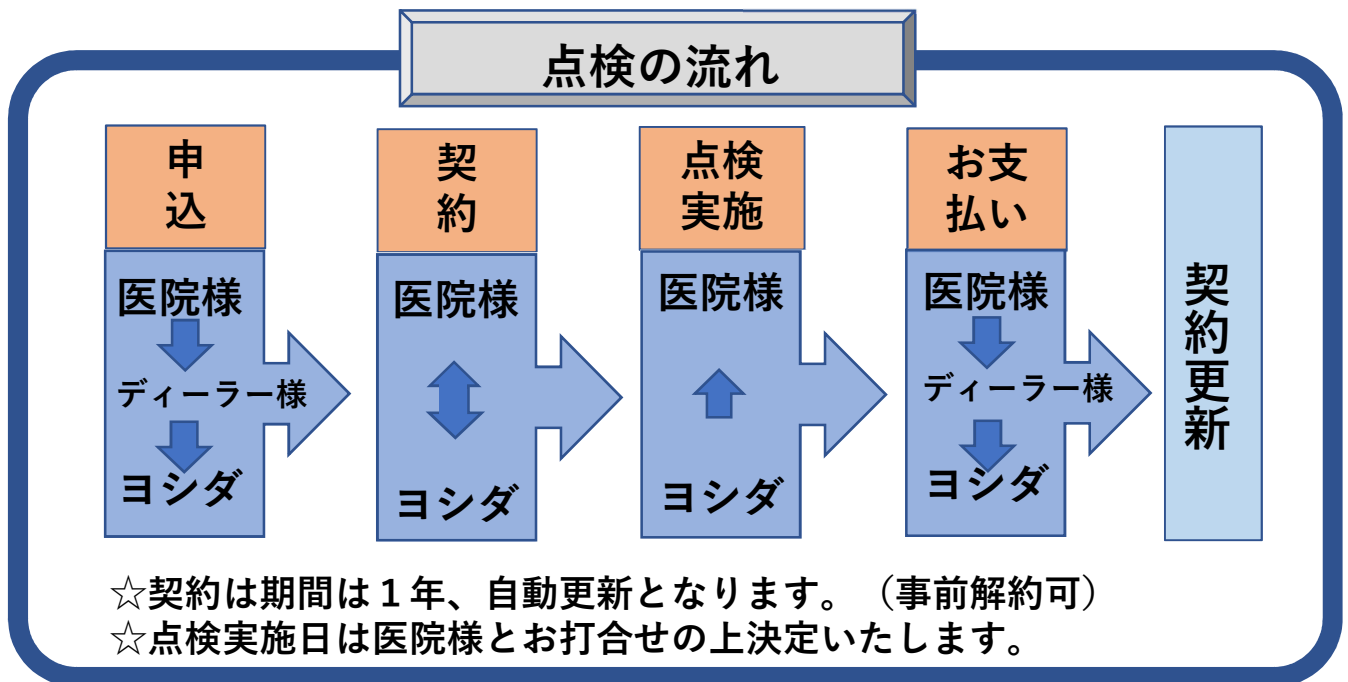

☆契約の期間は1年、自動更新となります。（事前解約可）

☆点検実施日は医院様とお打合せの上決定いたします。

※・部品供給中止の場合、速やかにお客様宛連絡し、次回の契約更新は行いません。
・点検料金は点検実施後、一括払いとなります。

YOSHIDA

ユニット簡易点検コース 点検内容

点検箇所	点検項目	判定基準	
サプライボックス	水圧(2次側)	各機種の基準に合致していること。	
	ユニポアジョブラ	IN/OUTの向きが正しい。	
		水漏れがない。 ロックしてある。	
	ユニポア	ユニポアを交換した。	
ユニット	鉢洗い	エアの混入が無いこと。	
	コップ給水	白濁した水が出なくなるまで確認する。	
DI	シリンジ(ドクター側)の注水	エアの混入が無いこと。	
		水切れが良いか。(水漏れが無いか)	
		水量をDRに確認したか。	
	シリンジ(アシスタント側)の注水	エアの混入が無いこと。	
		水切れが良いか。(水漏れが無いか)	
		水量をDRに確認したか。	
	タービン①の注水	エアの混入が無いこと。	
		水切れが良いか。(水漏れが無いか)	
		水量をDRに確認したか。(注水量の基準=50cc/分) タービンホース用Oリングを交換した。 ※タービン①又はタービン②	
	タービン②の注水	エアの混入が無いこと。	
		水切れが良いか。(水漏れが無いか)	
		水量をDRに確認したか。(注水量の基準=50cc/分) タービンホース用Oリングを交換した。 ※タービン①又はタービン②	
	マイクロモーター①の注水	エアの混入が無いこと。	
		水切れが良いか。(水漏れが無いか)	
		水量をDRに確認したか。(注水量の基準=50cc/分) マイクロモーター用Oリングを交換した。 ※マイクロモーター①又はマイクロモーター②	
	マイクロモーター②の注水	エアの混入が無いこと。	
		水切れが良いか。(水漏れが無いか)	
		水量をDRに確認したか。(注水量の基準=50cc/分) マイクロモーター用Oリングを交換した。 ※マイクロモーター①又はマイクロモーター②	
	超音波スケーラーの注水	エアの混入が無いこと。	
		水切れが良いか。(水漏れが無いか)	
		水量をDRに確認したか。(注水量の基準=30cc/分)	
	サプライボックス	排水	水漏れが無いこと。 鉢に水が溜まらないこと。
		立上り配管隙間封鎖	床下への漏水防止策が実施されている。