

今こそ義歯を学ぼう

無歯顎患者を定期メンテナンス患者にする!

土屋 公義

日本橋土屋歯科医院 / 東京都中央区開業

リプロメルト・リプロクリーンを使った臨床



今こそ義歯を学ぼう
無歯顎患者を定期メンテナンス患者にする！

土屋 公義 日本橋土屋歯科医院 / 東京都中央区開業

患者様の超高齢化が急速に進む中、健康維持・増進のためには咀嚼・嚥下は最も大切な口腔機能であり、特に義歯製作は歯科にしかできない医療行為です。さらに義歯装着後に口腔衛生管理を持続させることがとても大切であり、総義歯でも定期検診に必ず来ていただける方法をご紹介します。

図1 来院時



装着後6か月経過でいらした患者様の義歯。良く咬めて全く問題ないが、毎日入れ歯洗浄剤で洗浄しているが落ちない汚れがあるのできれいにしたいと来院。


図2 歯石除去液「リプロメルト」、ステイン除去液「リプロクリーン」



「リプロメルト」使用上の注意



本剤を原液のまま補綴物全体が浸かるまで容器に入れます。

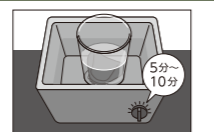


容器ごと超音波洗浄器に5~10分程度かけます。
※補綴物を本剤に30分以上浸漬しないでください。

「リプロクリーン」使用上の注意



本剤を2倍に水で薄めて充分攪拌の後、補綴物全体が浸かるまで容器に入れます。

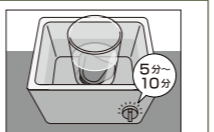

容器ごと超音波洗浄器に5~10分程度かけます。

頑固な歯石落としには「リプロメルト」(左)、ステイン等の汚れには「リプロクリーン」(右)を用い、超音波洗浄器で洗浄。

図3 洗浄



瓶に入れ「リプロメルト」を原液のまま15分歯石落としをして水洗してから「リプロクリーン」15分。最後に水で5分、超音波洗浄器にかける。(リプロクリーンは使用上の注意を無視して原液で使用。)

図4 洗浄後



こんなにきれいになりました。きれいになれば、喜んでいただける。患者様に「歯科医院専用の特殊な洗浄剤で患者様にお渡しできませんが、いらしていただければいつでもお申し付けください」と伝えると必ず汚れたらまた来院される。

図5



どのくらい「リプロメルト」の洗浄効果が高いか？ 見ていただくために歯石の付いた透明レジンのスプリントを用いました。

図6 歯石除去液「リプロメルト」を使用して洗浄後




「リプロメルト」15分使用後。歯石がきれいに取れてすっきりなのですがステインは残っています。

図7 ステイン除去液「リプロクリーン」で洗浄後



使用上の注意を無視して原液で今度は「リプロクリーン」で15分洗浄後、水で5分間洗浄。こびり付いたステインも落ち、比べていただくわかりますが新品同様でこんなにきれいになりました。色落ちて元に戻ったのもわかります。

図8 来院時

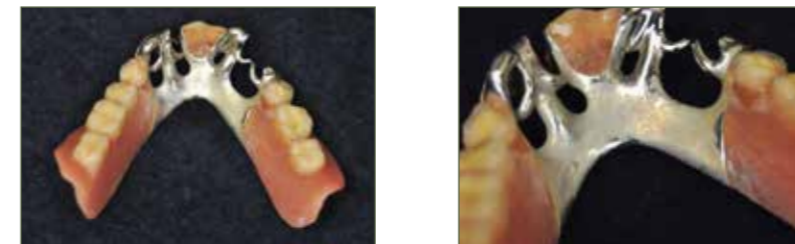

初めて定期検診でいらした方の義歯が汚れていたのを洗浄します。

図9 洗浄後



「リプロメルト」「リプロクリーン」両方とも使い、きれいになりました。患者様から「先生困るよ！新しいの作るんだったら言ってくれたらちゃんとお金を払うのに…。新品にしてもらって悪いな!」と、こちらの話も聞かずに喜んでお帰りになりました。きっと、患者様は入れ歯がきれいになったことを新しくなったと勘違いしています。

そのくらい義歯がピカピカになる「リプロメルト」「リプロクリーン」は、増患・増益のロコミのツールであると信じています。



ヨシダの

義歯関連製品

チェアサイドで精度の高い複製義歯を製作できます。



複製義歯用常温重合レジン

コピーデンチャー

- 標準価格：17,400円
- 色調：ピンク●内容量：歯冠用粉60g、床用粉200g、液200mL、表面滑沢材30mL（※複製用シェル別売）
- 一般的名称：義歯床補修用レジン●販売名：コピーデンチャー●承認番号：20300BZ00403A01（管理）
- 製造販売元：亀水化学工業（株）

はじめはティッシュコンディショナーとして機能し、約1週間でその機能印象面が徐々にリライニング面に変化。



動的機能リライニング材

リップロライナー

- 標準価格：18,500円
- 色調：ピンク・ライブピンク●内容量：粉50g、液45mL、ニューソフトコート30mL、粉計量カップ、3mL用スポイト、ラバーカップ、スパチュラ
- 一般的名称：義歯床用硬質裏装材●販売名：リップロライナー●承認番号：219AFBZX00118A01（管理）（特許取得済）
- 製造販売元：亀水化学工業（株）

筋圧形成による床辺縁・延長が口腔内で直接行えます。



床辺縁延長・封鎖用レジン

ペリモールド

- 標準価格：10,800円
- 色調：ピンク●内容量：粉70g、液50mL、ニューソフトコート6mL、シリンジ2本、スポイト1本、スパチュラ1本
- 一般的名称：義歯床補修用レジン●販売名：ペリモールド●承認番号：20300BZ01234000（管理）
- 製造販売元：亀水化学工業（株）

従来のティッシュコンディショナーより*高い口腔内耐久力があり、粘膜面の機能印象もとれます。



ティッシュコンディショナー/機能印象材

ティッシュコンピンク

- 標準価格：7,300円
- 内容量：粉120g、液100mL、ラバーカップ・スポイト・スパチュラ・粉計量カップ各1個
- 一般的名称：義歯床用短期弾性裏装材●販売名：ティッシュコンピンク●承認番号：20500BZ00089A01（管理）※当社比
- 製造販売元：亀水化学工業（株）

