

息が  
気になる人、**80%**



口臭測定器

# ブレストロンII

# 口臭の測定時間わずか30秒。

小型・軽量で持ち運びもラクラク。測定ホースも1mと必要十分な長さを確保。

だから場所を選ばず、カウンセリングルームでもチェアサイドでも測定できます。測定時間もわずか30秒で患者さんを煩わせません。



患者さんに唾液を吸引させないように上向きにマウスピースをくわえさせ、口腔内気体を自動吸引します。



口臭の原因となるVSCガス(揮発性硫黄化合物)を検知し、適正なレベル(4段階レベル)を表示します。

※パネルデザインは変更になっております。



複数枚を同時にプリントアウトできるため1枚を患者さんに、残りをカルテに添付することが可能です。



プリンター内蔵だから  
コンピュータを必要とせずこれ1台。

プリンター内蔵で  
複数枚プリントアウト可能。



複数枚プリントアウトできるから、  
1枚を患者さんに、もう1枚をカルテに添付できます。

口臭の原因となるVSCガス(揮発性硫黄化合物)を検知し、結果を表示するまで  
わずか30秒という速さです。

わずか30秒で  
測定完了、即表示。



30秒



※パネルデザインは変更になっております。


患者さんが自分で保持。  
スタッフの手間をかけません。

マウスピースは患者さん自身が保持するので、  
スタッフやドクターの手間を軽減します。



正確な測定を促す  
フィルター内蔵マウスピース。

マウスピースに内蔵されたフィルターが  
VSCガス以外の余分なガスを除去。正確な測定を促します。  
また患者さんごとの交換ですので清潔です。

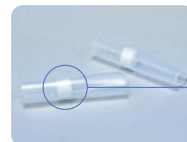

VSCガス以外を  
カットするフィルター。

測定ホースが1mと必要十分な長さを確保。  
カウンセリングルームでも  
チェアサイドでも測定できます。

ホース長1mで  
測定場所を選びません。



**VSC: Volatile Sulfur Compounds.**口臭の主な原因物質は、揮発性の硫黄化合物です。VSCには多くの化合物が含まれるが、口腔内空気中には、硫化水素、メチルメルカプタン、ジメチルサルファイドの3種類が単独、あるいは混在して認められます。これらのガスは、悪臭物質として知られ、パルプ工場や下水などの悪臭の原因でもあります。

◎プレストロンの仕様

●検知対象:VSC(揮発性硫黄化合物) ●検知範囲:50~3,000ppb ●測定時間:30秒 ●吸引ホース長:1m ●プリンタ:内蔵 ●外形寸法:W150×D230×H150mm ●重量:2kg ●標準価格:398,000円

※本製品は予告なく仕様等を変更する場合がございます。予めご了承ください。

禁無断転載

◎ご注文・お問い合わせは下記まで