


# ROOTY 560-Neo

クイック・エアスケーラ・根管拡大・洗浄装置 ルーティー560-YL-Neo

販売名：ルーティー560

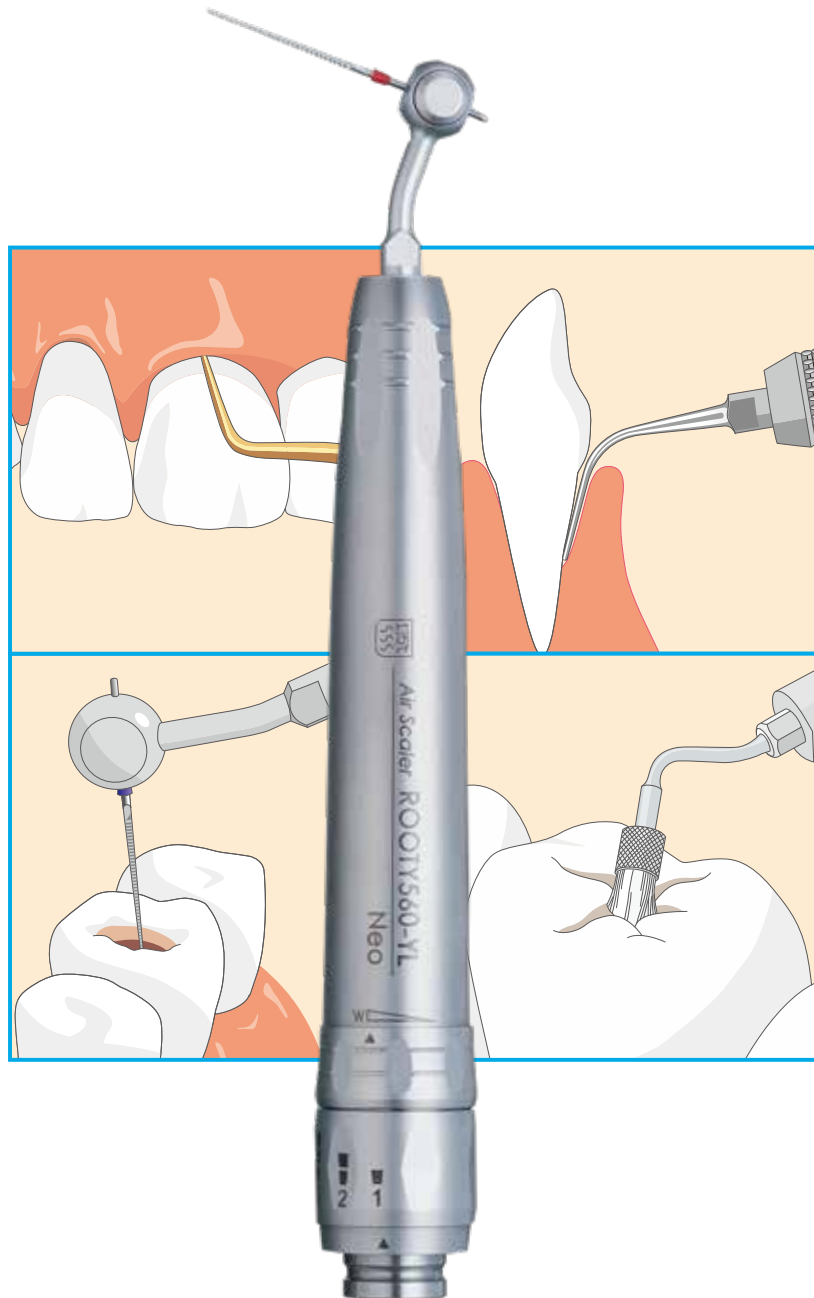



# ルーティーは、タービンホースに接続してすぐに使用できる サブソニック振動のスクーラー&根管治療装置です。


チップを交換するだけでスクーリング、根管拡大、根管洗浄、歯周ポケット洗浄や歯面清掃まで、様々な用途に活用できる大変便利なハンドピース。

## スクーリング


標準装備

### ソフトで優れた歯石除去効果を発揮

スクーリングチップ先端が三次元運動をするため、より優れた歯石除去効果とともに歯面への影響を抑えます。超音波スクーラーと比較して振動がソフトなので、歯に対してデリケートな除石が行えます。また、発熱も少なくスプレー水量が少なく済むため、術野を確保しやすくなっています。

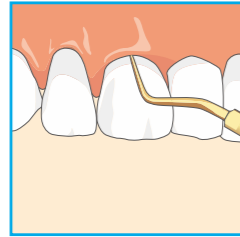

●標準チップ

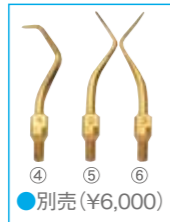

●別売(¥6,000)

- ① No.1チップ 屈曲部、前歯露出根面、舌側傾斜の著しい臼歯部等
- ② No.2チップ 下顎前歯部、舌側面、厚くて硬い歯石が板状に付着している場合
- ③ No.3チップ 歯肉線下、緑上歯石、タール状の付着物などをすべてに有効
- ④ No.4チップ 剥離掻爬根面の歯石除去
- ⑤ No.5チップ 下顎右側頬側面・下顎左側舌側面・上顎右側口側面・上顎左側頬側面
- ⑥ No.6チップ 下顎右側舌側面・下顎左側頬側面・上顎右側頬側面・上顎左側口蓋面

チップには摩耗が少ないチタンコーティングが施されています。

## 切削

オプション


### ●フィニッシングバーホルダー-K

タービンの回転切削ではなく振動により切削するため、指でバーをガイドすることができ、滑らかで精密な切削が可能です。またタービンヘッドと比べてネックが細いため、視野が確保できます。



標準価格

- ルーティ専用フィニッシングバーホルダー-Kセット 12,000円
- ルーティ専用フィニッシングバー A,B,C(5本入) 各5,000円
- ルーティ専用フィニッシングバー  
DHA1,DHA2,DHA3,DHA4,(5本入) 各6,000円

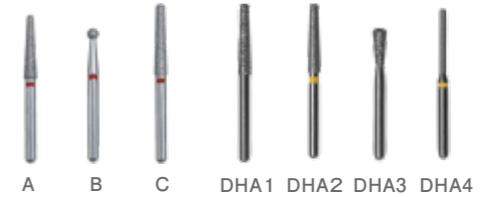

# MULTI FUNCTIONS

## エンドに!

標準装備

### サブソニック振動による洗浄効果

サブソニック振動によって生じる泡と攪拌作用により、根管を強力に洗浄。抜髄後の歯髄片やスマヤー層を取り除くことができます。手用ファイルなどでは届かない根尖や側枝などの洗浄も容易に行えます。

### ファイルの破折を防ぐソフトな振動

強力な洗浄パワーを持ちながらも発振はソフトなので、根管内でのファイル破折を回避するよう工夫されています。

### インスツルメントの交換が簡単です



●クイックホルダー-U  
丸いボタンを押すだけでインスツルメントの着脱がスピーディーに行えます。



●Uファイルホルダー  
専用工具でねじ式チャックを締めつけて固定します。



●Uファイル  
別売 ¥1,300 (6本入)




## 歯周ポケット内の洗浄に最適

オプション

### ●ペリオチップ

ペリオチップで優しくプラークコントロール

歯周組織に悪影響を及ぼすと言われている非付着性プラークを効率的に洗浄・除去し、プラークコントロールを行うことができます。サブソニック振動のため、優しく歯周ポケット内を洗浄できます。

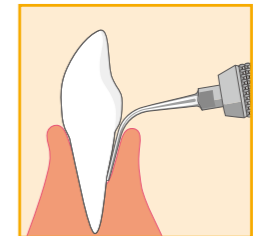

### ペリオチップの効果的な使用法

ルーティ560にペリオチップをセットし、多めの水量でパワー「1~2」で使用します。振動が強いと破折する恐れがありますのでご注意ください。



標準価格  
①RP1:作業長14mm ¥8,000  
②RP2:作業長16mm ¥8,000  
2本セット ¥15,000




## 歯面清掃に!

オプション

### ●SUSブラシ

サブソニック振動とSUSブラシで効率的な歯面清掃

3タイプの内部注水ブラシにより、複雑な形態の歯牙、叢生歯列、狭い歯間部など、回転ブラシでは難しい部位の清掃が容易に行えます。ブラシが回転しないので、頬粘膜を巻き込む心配がありません。また、歯面清掃以外にセメント除去にも使用できます。

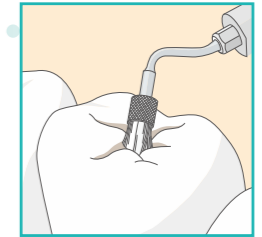

### 内部注水ブラシチップ


ペースト使用時は無注水にし、研磨クリーニング後に注水できるので、シリンジに持ち替えて注水する必要がありません。ブラシは10回程度オートクレーブ滅菌し再使用できるため、経済的です。パワーは「1~2」で使用します。



標準価格  
●SUSブラシセット ¥37,000  
(①②③④⑤⑥のブラシ各5個、SUSブラシチップNo.48)  
●SUSブラシ単品 ¥3,100(5個入)  
●SUSブラシチップNo.48単品 19,800円 ●SUS専用レンチ単品 800円

●一般名称: 歯科用エアスクーラー 販売名: SUSブラシセット  
●認証番号: 219AIBZX00075000 (管理 特管)  
●製造販売元: カボデンタルシステムズジャパン(株) 大阪府八尾市神武町2-24



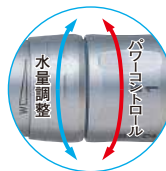

### パワーも水量も手元でコントロール

ハンドピース本体にパワーコントロールリングと水量調整リングを装備。パワーは調整可能です。

光付のオブチカジョイントをご使用の方はルーティ-560-YL-Neo、ルーティ-560-Y-Neoをお選び下さい。

## クイックジョイント ~各社のジョイントをご用意しています~




STジョイントをご使用の方は、ルーティ-560-YST-Neoをご使用ください。

ルーティ-	ジョイント
ルーティ-560-KL-Neo ルーティ-560-K-Neo	(KaVo® MULTiflex LUX®)
ルーティ-560-ML-Neo ルーティ-560-M-Neo	(MORITA® モリタαメインチューブ)
ルーティ-560-N-Neo	(NSK® Mach/Phatelus® Coupling)
ルーティ-560-OSL-Neo ルーティ-560-OS-Neo	(オサダファインジョイント)
ルーティ-560-SL-Neo ルーティ-560-S-Neo	(Sirona® Quick coupling)


©KaVo®及びMULTiflex LUX®は、Kaltenbach & Voight GMBH&CO.KGの商標又は登録商標です。©MORITA®及びモリタαメインチューブは、株式会社モリタ製作所の商標又は登録商標です。©NSK®及びMach/Phatelus®は株式会社ナカニンの商標又は登録商標です。©オサダファインジョイントは、長田電機工業株式会社の商標又は登録商標です。©Sirona®及びQuick couplingは、Sirona Dental Systems GMBHの商標又は登録商標です。

## あらゆるインストルメントが使用可能

ルーティ-は現在お使いのUファイル、エンジン用/手用インストルメントをそのままお使いいただけます。新たに専用インストルメントを購入したり、お持ちのものを加工する必要はありません。

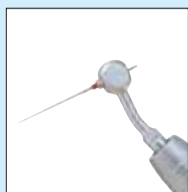

Uファイルホルダー (Uファイル用チャックφ0.8) (標準装備)

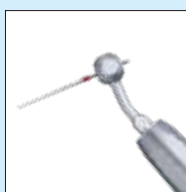

クイックホルダーU (標準装備)



別売

エンジン用チャック(ホルダーはUファイル共用) ●標準価格:4,000円



別売


手用インストルメント 手用ホルダー単品 ●標準価格:6,000円 手用チャック単品 ●標準価格:4,000円

### ルーティ-560セット内容



- ① 本体
- ② スケーリング用チップ(No.1)
- ③ スケーリング用チップ(No.2)
- ④ スケーリング用チップ(No.3)
- ⑤ クイックホルダーU
- ⑥ Uファイルホルダー
- ⑦ 専用チャックレンチ
- ⑧ チップカバー
- ⑨ 専用レンチ

### エミ-560セット内容

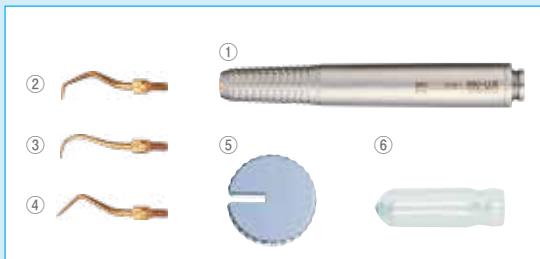

- ① 本体
- ② エミ-チタンチップ(No.1)
- ③ エミ-チタンチップ(No.2)
- ④ エミ-チタンチップ(No.3)
- ⑤ 専用レンチ
- ⑥ チップカバー

クイック・オブチカエアスケーラ・根管拡大・洗浄装置

### ルーティ-560-YL-Neo

●標準価格 ¥256,000

●一般の名称:歯科用エアスケーラ ●販売名 ルーティ-560 ●認証番号:20700BZZ00045000(管理 特管)

クイック・エアスケーラ・根管拡大・洗浄装置

### ルーティ-560-Y-Neo

●標準価格 ¥198,000

クイック・オブチカエアスケーラ

### エミ-560-LUX

●標準価格 ¥220,000

クイックエアスケーラ

### エミ-560

●標準価格 ¥162,000

クイック・エアスケーラ・根管拡大・洗浄装置

### ルーティ-560-YST-Neo

●標準価格 ¥198,000

クイックエアスケーラ

### エミ-560ST

●標準価格 ¥162,000

●一般の名称:歯科用エアスケーラ ●販売名 エミ-560 ●認証番号:20700BZZ00044000(管理 特管) ●製造販売元:(株)ミクロン 東京都大田区池上2-17-7

禁無断転載

ヨシダ取扱製品に関するお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

**0120-178-148**

※対応時間 / 月~金 9:00~19:00 土 9:00~17:00 (日曜・祝祭日を除く)

●取扱店



(01)02747937011744

C01620/2019年7月/PRI/20/@40/改