

YOSHIDA

# クラウン除去には時間がかかる! バーの傷みが早い!

こんなお悩みを感じている先生へのお役立ちのインスツルメント

こんな悩みを  
解決します!!

ハンドル部が長いので臼歯部のクラウン除去もラクラク! (実寸大)



左右非対称の刃部で  
さまざまな部位の  
クラウン除去に使用できます。

握りやすく力が入る六角形状ハンドル!  
しかも中空ハンドルだから軽量。  
手指の疲労を軽減します。



刃部先端の幅が約1mm。  
バーでの切削量1mmでOK!  
クラウン除去時間を短縮し、  
バーの切削量も軽減できるから  
バーも長持ち!

## ◎使用方法



図1●術前



図2●クラウンカッター H34 にて  
約1mm幅の切れ込みを入れる。



図3●クラウンリムーバーをさし込み、  
スリットを開くように力かける。



図4●この症例では1~2分でクラウン  
除去が行えた。

クラウン除去を簡便に短時間で行いたいから。  
**クラウンリムーバー #CRN134**

標準価格：12,000円

◎販売名：クラウンリムーバー◎一般的名称：歯周用ホー◎届出番号：13B1X00005000172(一般)



# オールセラミッククラウンの試適にも。



クラウンを傷付けず  
シリコンラバーで滑らず、しっかりグリップ!!



支台へのダメージも少なく、  
試適や除去ができます。

補綴物を優しく、丁寧に扱いたいから。  
**クラウンアダプター CRN2709**

標準価格：29,000 円

◎販売名:クラウンアダプター ◎一般的名称:鉗子◎届出番号:13B1X00005000196(一般)

取扱店名

ヨシダ取扱製品に関するお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

**0120-178-148**

※対応時間 / 月~金 9:00~19:00 土 9:00~17:00  
(日曜・祝祭日を除く)

製造販売元:  株式会社 **ヨシダ**

<http://www.yoshida-dental.co.jp>

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9



(01)02747937011140

C01592/2020年4月/PRI/20/@50/改

禁無断転載