


根管充填シーラー材

MTAフィラペックス

ついにMTAがシーラーになりました!!

Endodontic Sealer

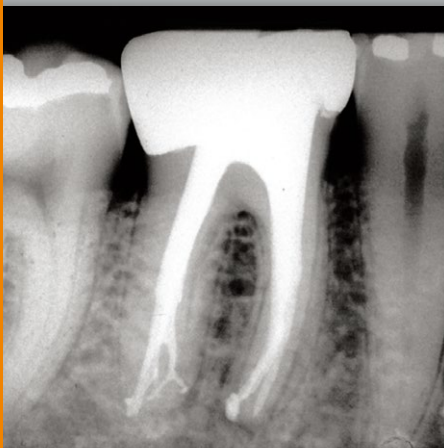

新しい根管充填への選択肢。MTAフィラペックスはMTAをベースにした根管充填用シーラーです。

適度な流動性と操作性を兼ね備えており、硬化時は膨張することでより高い封鎖性を可能にしたMTAベースのシーラーです。



MTAの特長

CaO (酸化カルシウム) 等の無機酸化物が水和物を生成し、硬化する過程でCa(OH)₂ (水酸化カルシウム) が生成され、高いpH値を示します。また骨組織に対する生体適合性を有します。

MTAフィラペックスの特長

MTA成分含有の根管充填用シーラーで、硬化時の膨張により高い封鎖性を有しています。適度な流動性を持ち、操作性にも優れています。

MTAアンジェラスとMTAフィラペックスの違い

MTAアンジェラスは覆髄材、MTAフィラペックスは根管充填用シーラーです。同じMTA成分含有ですが、使用目的によって使い分けができます。通法どおりガッタパーチャポイントを使用しての根管充填を推奨します。


硬化時に膨張

硬化時に膨張 (寸法変化 約0.09%*) するので、根管の封鎖性に優れています。

*Angelus社の社内試験の平均値

X線不透過性

MTAフィラペックスは、適度なX線不透過性を有しています。

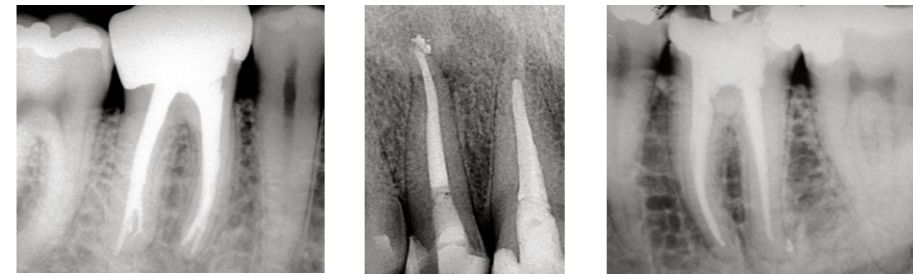

適度な流動性

MTAベースのMTAフィラペックスは、適度な流動性を持ち、根管内の細部にまで緊密な充填を可能にしました。

MTAフィラペックス pH値

MTAの特性を活かし高いpH値を示しています。

時間	MTAフィラペックス (pH)
24時間	9.39
7日	7.68
14日	8.89

*KUGA,MC,2011



●MTAフィラペックス チューブ 30g入

●MTAフィラペックス シリンジ 4g入

オートミックスとハンドミックスの2タイプ

更なる高い操作性を実現した「オートミックス」とコストパフォーマンスに優れた「ハンドミックス」の2タイプ。

オートミックスは約15回、
ハンドミックスは約200回を目安にご使用いただけます。



専用のミキシングチップを取り付けます。



プランジャーを押すと自動練和されたMTAフィラペックスが押し込まれます。いつでも同等の練和状態が得られます。



ペーストとキャタリストの比率 (容量) は1:1です。



ペーストとキャタリストが均一になるまで30秒間練和します。

操作時間・硬化時間・保存方法

操作時間	30分
硬化時間	120分以上
保存方法	熱源・直射日光を及び湿度を避け常温で保管 (15度~25度)

根管充填シーラー材

MTAフィラペックス

Endodontic Sealer

angelus® YOSHIDA

MTAフィラペックス チューブ 30g入

MTAフィラペックス シリンジ 4g入

ハンドミックス



- 標準価格：16,000円
- 内容量：ベース18g×1本、キャタリスト12g×1本、ミキシングパット

オートミックス



- 標準価格：6,600円
- 内容量：4g入シリンジ×1本、ミキシングチップ×10、ミキシングパット

●一般的名称：歯科用根管充填シーラー ●販売名：MTAフィラペックス ●認証番号：226ACBZX00043000(管理) ●製造販売元：株式会社ヨシダ

歯科用覆髄材料

MTAアンジェラス

MTAアンジェラス
ホワイト1g

練和に必要な専用の精製水・計量スプーンも付属。
このセットがあれば、手間なく使用が可能です。



- 標準価格：13,000円
- MTAアンジェラス ホワイト：1g×1本
- 専用精製水：3mL×1本
- 専用計量スプーン：1個

MTAアンジェラス
ホワイト0.14g×2

0.14gの少量パッケージ。
1回の使い切りタイプなので、ムダがありません。



- 標準価格：5,400円
- MTAアンジェラス ホワイト：0.14g×2包
- 専用精製水：3mL×1本

●一般的名称：歯科用覆髄材料 ●販売名：MTAアンジェラス ●認証番号：226ACBZX00015000(管理) ●製造販売元：株式会社ヨシダ

関連製品

ニッケルチタン製スプレッター
Ni-Tiスプレッター/Ni-Tiスプレッター30

ニッケルチタン製スプレッターだから高い追随性。

ニッケルチタンの先端追従性が
精度の高い充填を可能にします。



- 標準価格：各7,500円
- 種類：◎Ni-Tiスプレッター・REEN45P(太)・REEND11T(細) / Ni-Tiスプレッター30・REENMA5730
- 一般的名称：歯科用根管スプレッター ●販売名：Ni-Tiスプレッター/Ni-Tiスプレッター30
- 届出番号：◎Ni-Tiスプレッター・13B1X00005000192(一般) / ◎Ni-Tiスプレッター30・13B1X00005000186(一般)
- 製造販売元：(株)ヨシダ

根管充填用
ガッタパーチャポイントP71/ガッタパーチャポイントアクセサリ

適度な硬さとしなやかさ。アクセサリは「Ni-Ti スプレッター」と
テーパーを合わせているので、より緊密な側方加圧充填が可能です。



- 標準価格：
ガッタパーチャポイントP71(メインポイント)
◎アソート(120本入：各2,100円(＃15～40・＃45～80)
◎単品(全18種)120本入・各2,100円(No.15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、70、80)
60本入・各1,100円(No.90、100、110、120、130、140)
ガッタパーチャポイントアクセサリ(アクセサリポイント)
◎アソート(100本入：各2,100円(FS/FM/FL/M)
◎単品(全8種)100本入・各2,100円
[FS(細小)、FM(細中)、FL(細大)、S(小)、M(中)、L(大)、LM(太中)、XL(極太)]
- 一般的名称：歯科用根管充填ガッタパーチャポイント ●販売名：ガッタパーチャポイント
- 認証番号：224AGBZI00001000(管理) ●製造販売元：株式会社SHIKAZAI

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●価格は2015年2月現在。消費税別です。

●お問い合わせは下記まで

禁無断転載