

Reparative cement

歯科用覆罩材料

MTA アンジェラス

MTA ANGELUS®



0.14g入



1g入

露出した非感染生活歯髄に対し、 外来刺激による障害から保護する覆髄材です。

●製品構成

MTAアンジェラス ホワイト1g

練和に必要な専用の
精製水・計量スプーンも付属。
このセットがあれば、
手間なく使用が可能です。



MTAアンジェラス ホワイト	1g×1本
専用精製水	3mL×1本
専用計量スプーン	1個
標準価格	13,000円

MTAアンジェラス ホワイト0.14g×2

0.14gの少量パッケージ。
1回の使い切りタイプなので、
ムダがありません。



MTAアンジェラス ホワイト	0.14g×2包
専用精製水	3mL×1本
標準価格	5,400円

●MTAアンジェラスの物性

初期Ph	10.2
Ph(3時間後)	12.5
圧縮強度	44.2Mpa
カルシウムイオン放出量	0.93mg/dl
膨張率	0.3%
X線造形性	あり
作業時間	5分
初期硬化時間	約15分

●関連製品

MTAアプリケーター ミディアム 直径1.2mm

専用のMTAアプリケーターを使用することで、より簡単にMTAを注入できます。



- 先端径：φ1.2mm
- 標準価格：9,300円

MTAアプリケーター スモール 直径0.6mm



- 先端径：φ0.6mm
- 標準価格：12,000円

MTAフィラペックス チューブ 30g入

硬化時は膨張することでより高い封鎖性を可能にしたMTAベースのシーラーです。

ハンドミックス



- 標準価格：16,000円
- 内容量：ベース18g×1本、キャタリスト12g×1本、ミキシングパット

MTAフィラペックス シリンジ 4g入

オートミックス



- 標準価格：6,600円
- 内容量：4g入シリンジ×1本、ミキシングチップ×10、ミキシングパット

●一般的名称：歯科用注入器具 ●販売名：MTAアプリケーター ●届出番号：13B1X00005000207(一般)

●一般的名称：歯科用根管充填シーラ ●販売名：MTAフィラペックス ●認証番号：226ACBZX00043000(管理)


●MTAアンジェラスの使用手順



① 術前デンタルX線写真。4 | 遠心に歯髄に近接した深いカリエスが確認できる。電気的歯髄診では、陽性反応を示した。



② 窩洞辺縁から軟化象牙質を除去し、中心部を手用のラウンドエクスカで慎重に除去したところ露髄した。

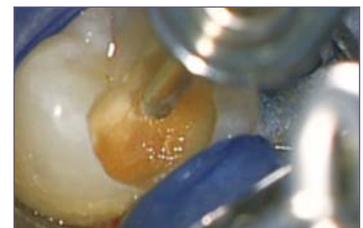

③ 露髄面に削片が残っていないことを確認し、MTAセメントを、キャリアを使用し置いていく。



④ 露髄面を刺激しないよう、そっと圧接していく。



⑤ グラスアイオノマーセメントで仮封を行った。



⑥ 直接覆髄直後のデンタルX線写真

●一般的名称：歯科用覆髄材料 ●販売名：MTAアンジェラス ●認証番号：226ACBZX00015000(管理)

※2015年4月現在の価格です。

禁無断転載

ご注文・お問い合わせは下記まで

製造販売元  株式会社 **ヨシダ**

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9
TEL:03-3845-2931(器材部)
<https://www.yoshida-dental.co.jp/>

製造元：アンジェラス社
Angelus Indústria de Produtos Odontológicos S/A (ブラジル)



2015年4月/KIN/50/@20/改

(01)02747937012703