

| 口腔内カメラ | WAVE PICT プラス |

WAVE  
PICT PLUS

瞳と同じように細部をとらえるオートフォーカス口腔内カメラ。

人の「瞳」を持った口腔内カメラWAVE PICT プラス。  
そのテクノロジーがさらにスムーズな  
インフォームドコンセントを実現します。

人間の瞳のようにピントを自動調整するオートフォーカス。  
より詳細な画像を瞬時に映し出します。コードレス化により  
PC接続もスムーズ、しかもチェア間の移動も簡単。術者の  
第3の目「WAVE PICT プラス」がさらに詳細な診査・診断  
を可能にします。



# 撮影も、画像を見るのも、80万画素の高画質。 80万画素の画像そのままだから、より精細な診査・診断に役立ちます。



自動照度調整なので白歯部も明るく鮮明に撮影できます。



ピント自動調整なので隣接面カリエスなども簡単に撮影できます。



偏光プリズムレンズ搭載で光のハレーションを抑えます。

## わずか65グラム\*の軽量ハンドピース型カメラ。

\*有線タイプの場合。無線タイプはバッテリー内蔵のため94グラム。

ハンドピース型カメラはわずか65グラム。重さを気にすることなく、撮影したい部位を正確にフォーカスできます。



## 無線タイプも有線タイプも見たいところで見られます。

無線タイプは1台で複数のパソコンに画像転送可能。初期投資を抑えることができます。有線タイプはUSBにダイレクトに接続可能。チェア間の移動もラクラク！



## 顔貌サイズからマクロ、動画撮影まで ワイドな撮影範囲。

自動照度調整、ピント自動調整ならびに偏光プリズムレンズ採用で、撮影範囲、照度などを自動的に調整します。動画から静止画、静止画から動画も手軽に撮影可能です。



顔貌サイズ



口角サイズ



1歯牙単位サイズ



動画撮影

## 別売品



●フットペダル(無線タイプのみ)




●ドッキングステーション


●レンズカバー  
(500枚入)

## 各部の名称

### ●無線タイプ

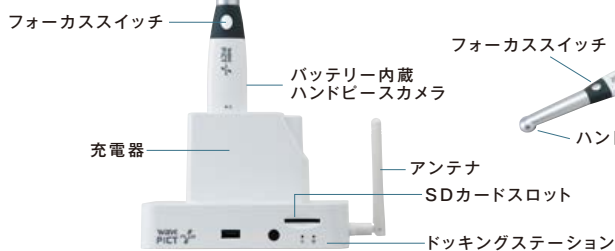

### ●有線タイプ

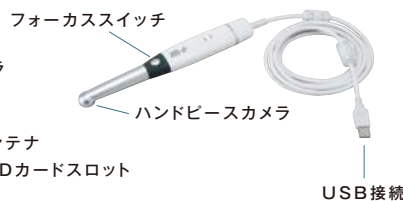

無線タイプはUSBケーブルを接続すれば、有線使用も可能です。

## 人の瞳のようにピントを自動調整。 詳細な画像を映し出す新機構。

煩わしい調整を必要としないピント自動調整機構を搭載。撮影したい部位を的確に撮影します。8個のスーパー白色LEDは撮影に十分な明るさを提供。しかも撮影部位の照度に合わせて自動的に光量を調整します。



明るい部位撮影時



暗い部位撮影時



- 一般の名称: 歯科用口腔内カメラ ●販売名: WAVE PICT プラス ●無線タイプ: ハンドピース型カメラ1台、充電器1台、ドッキングステーション1台、USBケーブル1本、電源ケーブル1本、レンズカバー20枚
- 有線タイプ: ハンドピース型カメラ1台、USBケーブル1本、電源ケーブル1本、レンズカバー20枚
- 電源: AC100V±10%50/60Hz ●電源入力: 1.25A ●本体寸法: ハンドピース型カメラ・全長191.3mm、ドッキングステーション: W149×D93×H32mm ●本体重量: 65g(有線タイプ)、94g(無線タイプ)
- 標準価格: ◎無線タイプ498,000円 ◎有線タイプ298,000円 ◎別売品・フットペダル35,000円・レンズカバー(500枚入)24,000円・WAVE PICT プラス用ドッキングステーション120,000円
- 届出番号: 13B2X00114000008(一般)

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。※別売のコンピュータ、ビュアソフト(トロフィウインドウズ)が必要です。

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで

◎発売元:

株式会社 **ヨシダ** <http://www.yoshida-dental.co.jp>

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.03-3845-2925(画像情報機器部)

●製造販売元: 株式会社トロフィー・ラジオロジー・ジャパン 東京都港区虎ノ門1-17-1



(01)02747937011676

2013年10月/PRO/20/40/改