



パワーも水量も手元でコントロール
 ハンドピース本体にパワーコントロールリングと水量調整リングを装備。
 パワーは調整可能です。

光付のオブチカジョイントをご使用の方はルーティ-560-YL-Neo、ルーティ-560-Y-Neoをお選び下さい。

クイックジョイント ~各社のジョイントをご用意しています~



STジョイントをご使用の方は、ルーティ-560-YST-Neoをご使用ください。

ルーティ-	ジョイント
ルーティ-560-KL-Neo ルーティ-560-K-Neo	(KaVo® MULTiflex LUX®)
ルーティ-560-ML-Neo ルーティ-560-M-Neo	(MORITA® モリタαメインチューブ)
ルーティ-560-N-Neo	(NSK® Mach/Phatelus® Coupling)
ルーティ-560-OSL-Neo ルーティ-560-OS-Neo	(オサダファインジョイント)
ルーティ-560-SL-Neo ルーティ-560-S-Neo	(Sirona® Quick coupling)

あらゆるインスツルメントが使用可能

ルーティ-は現在お使いのUファイル、エンジン用/手用インスツルメントをそのままお使いいただけます。
 新たに専用インスツルメントを購入したり、お持ちのものを加工する必要はありません。



Uファイルホルダー
(Uファイル用チャックφ0.8)
(標準装備)



クイックホルダーU
(標準装備)



別売
エンジン用チャック
(ホルダーはUファイル共用)
●標準価格:4,000円



別売
手用インスツルメント
手用ホルダー単品
●標準価格:6,000円
手用チャック単品
●標準価格:4,000円




別売
フィニッシングバーホルダーK
ホルダー単品
●標準価格:9,000円




別売
ルーティ-専用
フィニッシングバー
No.1,2,3 5本入り
●標準価格:5,000円

ルーティ-560セット内容

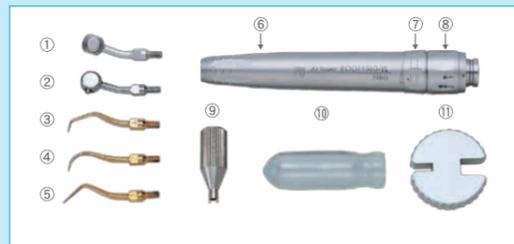

- ① クイックホルダーU
- ② Uファイルホルダー
- ③ スケーリング用チップ (No.1)
- ④ スケーリング用チップ (No.2)
- ⑤ スケーリング用チップ (No.3)
- ⑥ 本体
- ⑦ 水量調整リング
- ⑧ パワーコントロール・リング
- ⑨ 専用レンチ
- ⑩ チップカバー
- ⑪ 専用レンチ

エミ-560セット内容

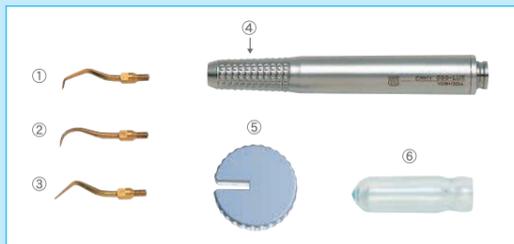

- ① スケーリング用チップ (No.1)
- ② スケーリング用チップ (No.2)
- ③ スケーリング用チップ (No.3)
- ④ 本体
- ⑤ 専用レンチ
- ⑥ チップカバー

クイック・オブチカエアスケーラ・根管拡大・洗浄装置 ルーティ-560-YL-Neo

●標準価格 ¥256,000

クイック・エアスケーラ・根管拡大・洗浄装置 ルーティ-560-Y-Neo

●標準価格 ¥198,000

クイック・エアスケーラ・根管拡大・洗浄装置 ルーティ-560-YST-Neo

●標準価格 ¥198,000

●一般的名称: 歯科用エアスケーラ ●販売名: ルーティ-560 ●認証番号: 20700BZZ00045000 (管理 特管)

クイック・オブチカエアスケーラ エミ-560LUX

●標準価格 ¥220,000

クイックエアスケーラ エミ-560

●標準価格 ¥162,000

クイックエアスケーラ エミ-560ST

●標準価格 ¥162,000

●一般的名称: 歯科用エアスケーラ ●販売名: エミ-560 ●認証番号: 20700BZZ00044000 (管理 特管)

●取り扱いディーラー名

発売元/ 株式会社 **ヨシダ**
 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL:03-6880-2155(サポートセンター)
 ●製造販売元: (株)ミクロン 東京都大田区池上2-17-7


禁無断転載



ROOTY 560-Neo

クイック・エアスケーラ・根管拡大・洗浄装置 ルーティ-560-YL-Neo

販売名: ルーティ-560

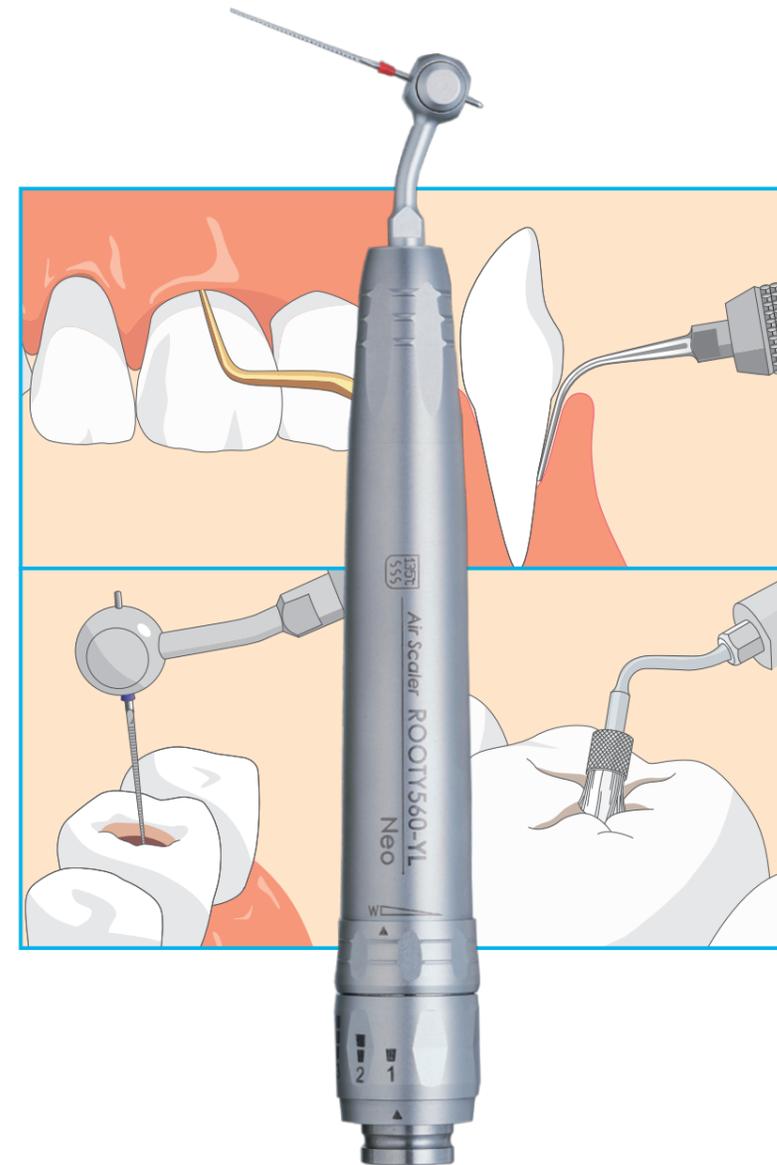

ルーティーは、タービンホースに接続してすぐに使用できる サブソニック振動のスクレーラー&根管治療装置です。



チップを交換するだけでスクレーリング、根管拡大、根管洗浄、歯周ポケット洗浄や歯面清掃まで、様々な用途に活用できる大変便利なハンドピース。

1. スクレーリング

標準装備

すぐれた除石効果

スクレーリングチップ先端が三次元運動をするため、優れた除石効果とともに歯面への影響を抑えます。超音波スクレーラーと比べて振動がソフトなため、歯に対してデリケートに除石できます。また、発熱も少なく、スプレー水量が少なくすみ、術野を妨げることがありません。
チップには**摩擦が少ないチタンコーティングが施されています。**

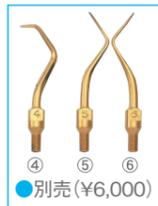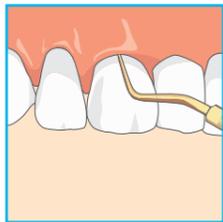

- ① No.1チップ 屈曲部、前歯露出根面、舌側傾斜の著しい臼歯部等
- ② No.2チップ 下顎前歯部、舌側面、厚くて硬い歯石が板状に付着している場合
- ③ No.3チップ 歯肉縁下、縁上歯石、タール状の付着物などすべてに有効
- ④ No.4チップ 剥離掻爬根面の歯石除去
- ⑤ No.5チップ 下顎右側頬側面・下顎左側舌側面・上顎右側口側面・上顎左側頬側面
- ⑥ No.6チップ 下顎右側舌側面・下顎左側頬側面・上顎右側頬側面・上顎左側口蓋面

●標準チップ

●別売(¥6,000)


3. 歯周ポケット内の洗浄に最適

オプション

●ペリオチップ

サブソニック振動だから歯周ポケットのプラークコントロールが効果的に、優しく行えます。

ペリオチップは歯周組織に悪影響を及ぼすと言われている非不着性プラークを効率的に洗浄・除去し、プラークコントロールを行うことができます。またペリオチップはサブソニック振動のため、やさしく歯周ポケット内を洗浄できます。

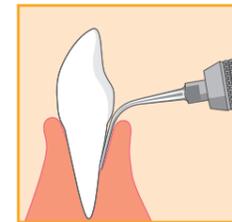

ペリオチップの効果的な使用法

ルーティーにペリオチップをセットし、水量は多めにし、パワーは「1~2」で使用します。振動が強いと破折する恐れがありますので、ご注意ください。



標準価格
①RP1:作業長14mm ¥8,000
②RP2:作業長16mm ¥8,000
2本セット ¥15,000

4 FUNCTIONS

2. エンドに!

標準装備

強力な洗浄効果

サブソニック振動によるキャピテーション効果と攪拌作用により、根管を強力に洗浄し、抜髄後の歯髄片やスメヤー層を取り除くことができます。また手用ファイルなどでは届かない根尖や側枝などの洗浄も容易に行えます。

インスツルメントの破折を防ぐソフトな振動

強い洗浄パワーを持ちながらも、ソフトな発振をするので、インスツルメントが根管内で破折するのを防ぎます。

インスツルメントの交換が簡単です



●クイックホルダーU
丸いボタンを押すだけでインスツルメントの着脱がスピーディーに行えます。



●Uファイルホルダー
専用工具でねじ式チャックを締めつけて固定します。



●Uファイル
別売 ¥1,200 (6本入)




4. 歯面清掃に!

オプション

●SUSブラシ

サブソニック振動と3タイプの内部注水ブラシにより、あらゆる部位の歯面清掃を効果的に行えます。

複雑な形態の歯牙、叢正歯列、狭い歯間部など回転式ブラシでは難しい部位への清掃が容易に行えます。ブラシが回転しないので頬粘膜を巻き込む心配がありません。また、歯面清掃以外にセメント除去に使用できます。SUSブラシを使用すれば、今まで2~3分程度かかっていたテンポラリーセメントの除去が30秒~1分程度で可能です。

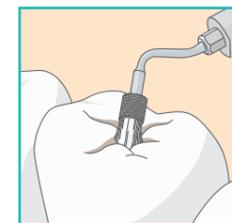

内部注水型ブラシチップ

ペースト使用時は無注水にし、研磨クリーニング後に注水できるのでシリンジに持ちかえて注水する必要がありません。ブラシは10回程度オートクレーブ滅菌が可能で再使用できるため経済的です。



標準価格
●SUSブラシセット ¥37,000
(①②③④⑤⑥のブラシ各5個、SUSブラシチップNo.48)
●SUSブラシ単品 ¥3,100(5個入)
●SUSブラシチップNo. 48単品 19,800円 ●SUS専用レンチ単品 800円

●一般的名称: 歯科用エアスクーラ 販売名: SUSブラシセット
●認証番号: 219AIBZX00075000 (管理 特管)
●製造販売元: カボデンタルシステムズジャパン(株) 大阪府八尾市神武町2-24