


第一印象を最終印象に。

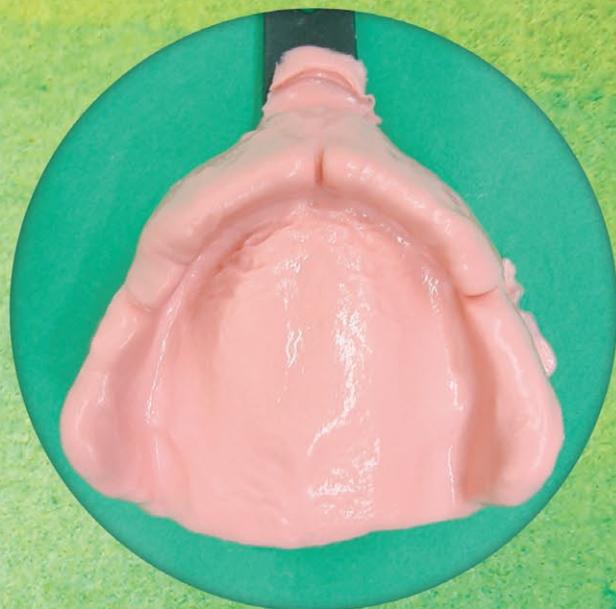

- ◎顎堤の吸収度合に関係なく、適切な印象が採得できる無圧印象に適したデザイン。
- ◎トレー粘膜側は義歯床のような形態。解剖学的形態を再現しているため下顎トレーは臼歯部後方を、上顎トレーはハミュラーノッチとアーラインの印象採得が可能です。
- ◎専用キャリパーによるサイズ計測で、患者さんにより適したトレーを選択できます。
- ◎耐熱樹脂製(PPS樹脂)なのでオートクレーブ滅菌*が可能です。
*乾燥工程は不可(耐熱温度132℃)
- ◎一体成形でハンドルの脱落がありません。



無歯顎用トレー

ボーダーロックトレー

SCHREINEMAKERS

BORDER-LOCK®

IMPRESSION TRAYS

総義歯製作に適した印象トレー「ボーダーロックトレー」。


第一印象を最終印象にできるので 総義歯製作が容易に行えます。

操作性を考えたトレーハンドルとフィンガーレスト


- ◎トレーハンドル：ハンドルの角度が適正なため、口腔内へのトレーのアクセスが容易に行えます。
- ◎フィンガーレスト：下顎トレーにフィンガーレストを採用したことにより、齶頬移行部の印象がより鮮明に採得できます（無圧印象）。



専用のサイズパッドとコンパスでトレーを選択

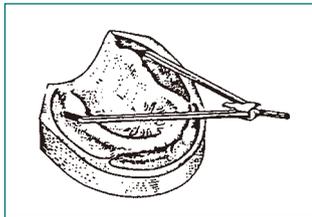


◎上顎：コンパス先端
第一大臼歯部

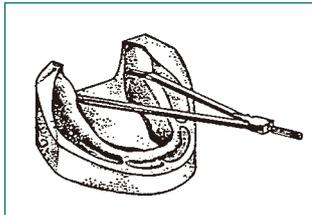


◎上顎：コンパス内側
左右頬側臼歯最大隆起部
(上顎結節頬側最大隆起部)

◎下顎：コンパス外側
左右臼後パッド舌側面間
(臼後三角舌側面間)

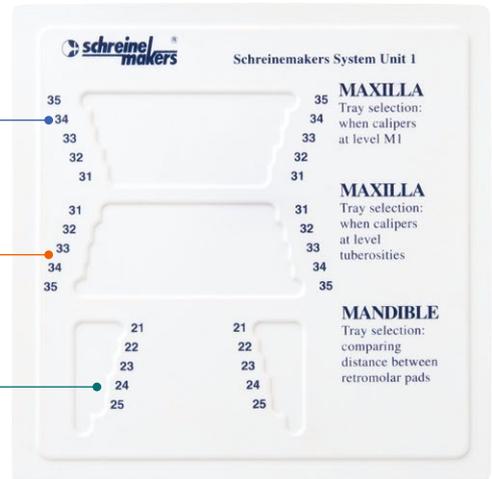

トレーサイズ

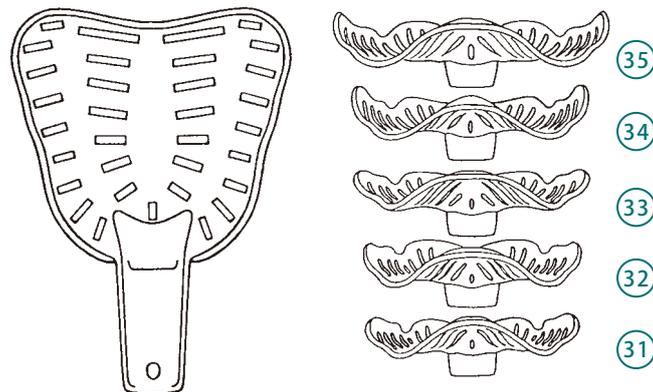

◎単位：mm ※トレー長さ=ハンドルの長さ(32mm)を除く

上顎					
No.	U31	U32	U33	U34	U35
長さ	62	66	69	71	80
幅	52	55	59	61	65
下顎					
No.	L21	L22	L23	L24	L25
長さ	49	52	55	57	59
幅	59	62	66	70	71

●一般的な名称：歯科印象採得用トレー ●標準価格：37,950円(無歯顎/上顎用5個、下顎用5個、サイズ計測用キャリパー)4,150円(各1個) ◎届出番号：13B1X00005000125

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで

◎製造販売元：

株式会社 **ヨシダ**

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.03-3845-2931 (器材営業本部) <http://www.yoshida-dental.co.jp>

●製造元：クラン社



(01)02747937009970

2012年5月/明/30/ @30/改