

Graniocce

超音波スケーラー グラニオス



ハンドピース

先端がφ9.5mmのスリムハンドピースだから、届きにくい部位へのアプローチを可能にし、指先で簡単に向きを変えられます。狭い口腔内でもスペースを確保し、より適正な角度で使用することができます。

グラニオスLUX LED光付ハンドピース



自然光に近く、広い照射野を持ったLED光で、無影灯の届きにくい臼歯部のスケーリングがより快適になります。オートクレーブ滅菌可。

グラニオス 光無しハンドピース



ライトガイドをなくしたことで、スリムになったハンドピース。オートクレーブ滅菌可。



Twin LED方式ライト

ハンドピースの根元に2つの高輝度LEDを搭載。ハンドピースには透過率の高いガラスロッドを使用。術野をムラなく均等に照らします。

フィードバック機能

硬い歯石のスケーリング時など、自動的に負荷を感知し、チップ先端に常に設定パワーを供給します。歯面の状態に合わせて安定したスケーリングを行うことができ、思いのままのスケーリングが可能です。

オートチューニング機能

設定したパワーが、常にチップ先端に伝わるように発振周波数を自動で調整します。チップのバタつきを最小限に抑えるため、歯面にチップがしっかりと吸い付きします。

見やすい大型ディスプレイ

視認性の高い大型ディスプレイで、10段階の数字とバーグラフでパワーやボトル水量を表示します。設定状態が一目で確認できます。




注水選択可能な2ボトルタイプ

治療目的に応じて、薬液や温水の使用ができます。簡単に着脱できる2つの400mLボトルで入れ替えや継ぎ足し回数が減少し、治療時間の短縮に繋がります。



使いやすい操作アイコンキー

キー表示にアイコンを使用することで、操作性を追求するだけでなく押し間違えといった誤操作を防ぎます。簡単操作でパワー・注水量・ボトルの切替など様々な調整が可能です。

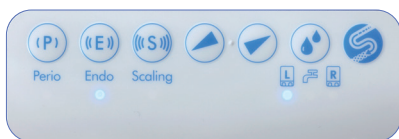

らくらくクリーニングモード

薬液使用後、ボトルに水を入れオートクリーニングキーを押すだけで、注水回路を自動的に洗浄します。メンテナンスが簡単です。



ボトルランプ

どちらのボトルを使用しているのかが一目でわかります。ボトルの切り替えはアイコンキーを押すだけです。



水量調整つまみ

ボトルも外部注水も注水調整つまみで注水量の微調整が簡単にできます。左右それぞれのボトルで各々の調整が可能です。



滅菌ケース



標準チップ



チップG1-G
歯間緑上用
ステイン除去に

チップG6-G
浅いポケットの
スケーリング・
ルートプレーニングに

チップP20-G
深いポケットの
スケーリング・
ルートプレーニングに

注水選択

2つの注水ボトル以外に外部注水を選択することができます。



- 電源電圧: AC100V 50/60Hz 電源入力: 29VA 駆動周波数: 28~32kHz
- 一般的名称: 歯科用多目的超音波治療器 ■販売名: グラニオス ■認証番号: 223ALBZX00043000 (管理医療機器 特管)
- グラニオスLUX 標準価格: 286,000円 ■セット内容: 本体、LED光付ハンドピース、フットスイッチ、チップ3本、チップレンチ3個、滅菌ケース、ボトル2個
- グラニオス 標準価格: 239,000円 ■セット内容: 本体、光なしハンドピース、フットスイッチ、チップ3本、チップレンチ3個、滅菌ケース、ボトル2個

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで

※当カタログに掲載の商品仕様および価格は、改良等により予告なく変更する場合があります。また、掲載商品の色調は実際の商品の色と異なる場合があります。

◎発売元: 株式会社 **ヨシダ**
〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.03-3845-2931 (器材部)
●製造販売元: 株式会社ナカニシ

