

DENTCRAFT.

## DC Ultrasonic3800Z

超音波洗浄器 / DCウルトラソニック3800Z

- スイープ方式によるムラの少ない洗浄
- シンプルで簡単な操作性
- コンパクトなボディに容量3.8Lの洗浄槽




コンパクトな本体に大きな容量の洗浄槽。  
スイープ発振方式でムラの少ない洗浄を可能にしました。



#### スイープ発振方式

周波数を変調させて発振することにより、定在波の発生を抑制し、洗浄ムラを少なくします。

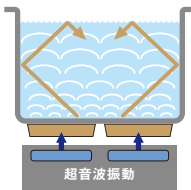

#### コンパクトなボディに3.8Lの大容量

コンパクトなボディながら3.8Lの洗浄槽で大量の器具が洗浄可能。洗浄の手間を大幅に削減し、洗浄コストを抑えます。

#### シンプルで簡単な操作性

洗浄する器具を入れてボタンをワンタッチ。シンプルで使いやすい操作パネル。




#### 洗浄能力比較試験

超音波洗浄器にアルミ箔を入れ、その剥離状態により洗浄力を確認します。  
(洗浄時間30秒、洗浄液は水道水を使用。)



##### 槽内に水平にアルミ箔を入れる

全体にムラなく剥離が見られます。

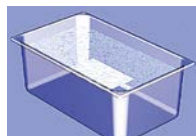

##### 槽内に垂直にアルミ箔を入れる

全体にムラなく剥離が見られます。

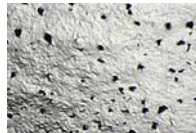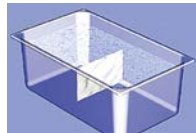

洗浄槽内全体にムラなく超音波による洗浄効果が得られます。

#### ベストコンビネーション洗浄剤

「マイクロ10プラス」と「DC メディックスPLUS」の2種類の超音波洗浄器用洗浄剤が付属しています。



##### 防錆洗浄液 マイクロ10プラス

耐蝕、錆止め効果に優れた洗浄剤。インスツルメントの長期使用を可能にするので経済的です。

●標準価格:10,600円(1,000mL入)



##### 超音波洗浄器用洗浄剤 DC メディックスPLUS

頑固な汚れやオイルの付着などを特殊な浸透性、分散性、剥離性によって迅速に除去します。

●標準価格:2,200円(120g入)

#### ウルトラソニック3800Z仕様

- 標準価格:120,000円 ●セット内容:・ウルトラソニック3800Z、マイクロ10プラス(1,000mL)、DC メディックスPLUS(120g)
- 本体寸法:W342mm×D201mm×H177mm ●洗浄槽寸法(開口):W299mm×D150mm×H100mm(逆台形状) ●洗浄槽容量3.8L ●本体重量:約2.7kg
- 電源:AC100V 50/60Hz ●消費電力:75W ●高周波出力:70W ●発振周波数:44kHz
- ◎販売名:ウルトラソニック3800Z ◎一般的名称:器具除染用洗浄器 ◎届出番号:20B2X00004000009(一般) 製造販売元:株式会社エスエヌディ 長野県諏訪市四賀3225-2

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

価格は2017年4月現在。消費税は含まれておりません。

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで

