

# 1台3役。

根管治療における洗浄・吸引・乾燥が一気に行えます。

## Step1

根管内に水を注入。

根尖付近までインサートチューブが到達。  
洗浄効果がアップしました。

## Step2


強力な水の還流効果で  
根管内の残渣を洗浄。

注水と吸引がはじまると根管内で強力な水の還流が発生し  
根管内の残渣[切削粉や血液、膿、滲出液等]を  
効果的に洗浄していきます。

## Step3

根管内の乾燥は  
わずか2～3秒で完了。

注水を止め、エアーのみによる吸引により  
根管内を約2～3秒で乾燥できます。

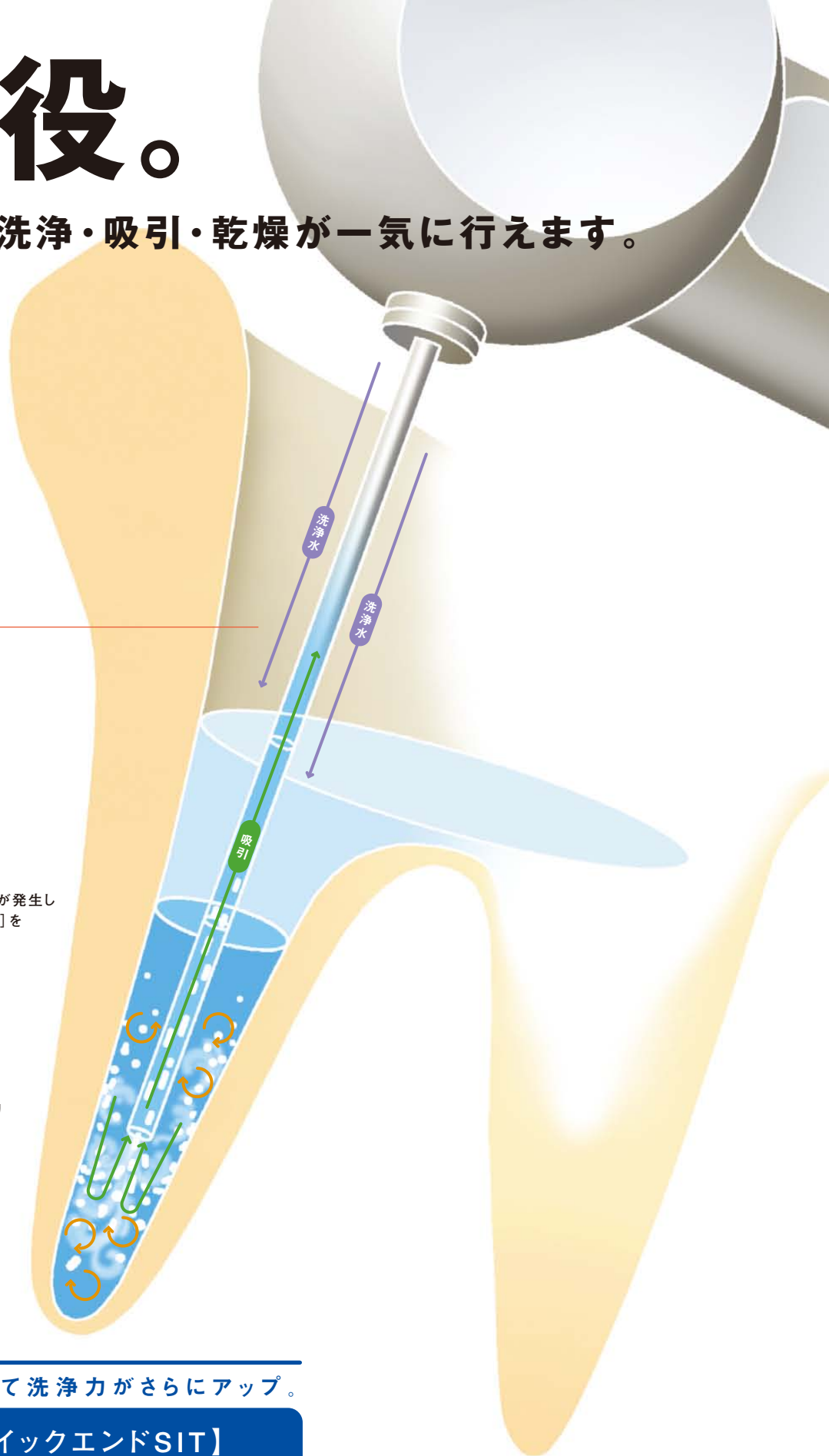

新しくスリムチューブになって洗浄力がさらにアップ。

歯科用根管洗浄器【クイックエンドSIT】

# Quick Endo SIT

スリムインサートチューブ

# エアータービン回路にジョイントするだけで すぐに使える「クイックエンドSIT」。

# Quick Endo SIT


歯科用根管洗浄器【クイックエンドSIT】

根管治療における残渣（切削粉や血液、膿、滲出液など）の洗浄・吸引・乾燥をスピーディーにより確実に行うことができます。

## Step1

### 注水・洗浄

注水と吸引が始まると根管内で強力な水の環流が発生し、根管内の残渣（切削粉や血液、滲出液）を効果的に洗浄します。

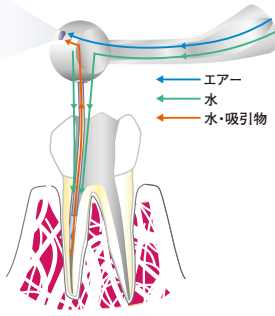


洗浄。インサートチューブに沿って洗浄水が根管内へ侵入しています。

## Step2 Step3

### 吸引・乾燥

注水を止めエアーのみによる吸引で根管内を約2〜3秒で乾燥できます。ペーパーポイントでは完全な乾燥確認のためにお使いください。

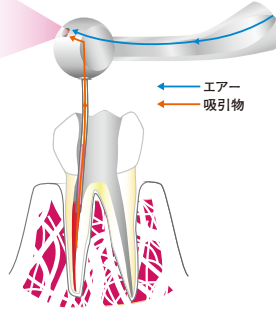


滲出液の吸引。

## Cleaning

### クリーニング

インサートチューブが汚物などで目詰まりしても手軽に除去できるワンプッシュ・クリーニング機構を備えています。

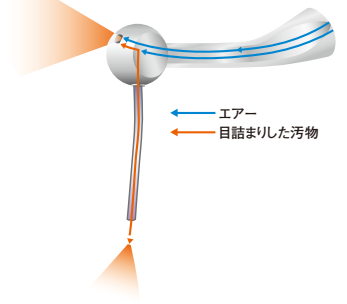

このボタンを押すだけでワンプッシュ・クリーニング。

**カンタン接続** タービンホースに接続するだけでカンタンにご使用いただけます。●他社のユニットでもご使用いただけるクイックジョイントもご用意しています。

クイックエンドSIT

クイックエンドSIT-ST

クイックオプチャジョイント

クイックジョイント

現在お使いのクイックエンドを最新のSIT（スリムインサートチューブ）に交換できるスリムインサートチューブキットをご用意しました。

◎標準価格：スリムインサートチューブお試しキット・3,600円（チューブノズル1本/スリムインサートチューブ20本/チューブ交換ドライバー）

●スリムインサートチューブが経済的になりました。スリムインサートチューブ単品◎標準価格6,800円（100本入）



◎セット内容●ハンドピース部・1本●ヘッド部・2本●スリムインサートチューブ・20本●クリーニングワイヤー・1本●予備Oリング（大）・2個●予備Oリング（小）・2個

◎仕様●名称：クイックエンドSIT/クイックエンドSIT-ST●手元圧力：0.2〜0.4Mpa（2.0〜4.1kgf/cm<sup>2</sup>）●空気消費量：30NL/min（手元圧力0.3Mpa時）

●吸引量：20mL/min（スリムインサートチューブなし）●重量：74g/79g（ヘッド部装着時）●全長：137mm/140mm（ヘッド部装着）◎標準価格：118,000円◎承認番号：21900BZX00751000  
スリムインサートチューブ単品◎標準価格：6,800円（100本入）スリムインサートチューブお試しキット◎標準価格3,600円（チューブノズル1本/スリムインサートチューブ20本/チューブ交換ドライバー）

●仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●価格には消費税は含まれておりません。

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで

バーコード

◎発売元：株式会社 **ヨシタ** 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.03-3845-2941（診療機器部）

◎製造販売元：株式会社ミクロン

2008年7月/新/15@110改