

# インプラント メンテナンス専用 開発されました。



## フッ素含有なし、RDA9.8だからインプラント専用ペースト

高濃度のリン酸フッ化ナトリウムなどは補綴修復物を変化させる可能性があります。

また、粗い研磨剤はインプラント(チタン)を傷つけることが懸念されます。

インプラントのメンテナンスには

フッ素含有なし、RDA9.8の

専用ペーストを用いることが大切です。

# インプラント ペースト

●標準価格：1,800円(45g入)

●一般的名称：歯科用研磨器材●販売名：インプラントペースト●届出番号：13B1X00014000115(一般医療機器)●製造販売元：サイプロン・デンタル株式会社



インプラント患者さんが  
増えているから。

インプラントのメンテナンスが大切！

高齢化社会に向かって。

予知性の高い  
インプラント治療をしたいから。



図1●3ヶ月ごとにメンテナンスに来院される患者さん。



図2●口腔内所見を行い、必要に応じてX線撮影を行っています。



図3●チタン体が露出しているので、インプラントペーストとPMTCスターターキット#105カップを用い（回転数は低速）メンテナンスを行います。

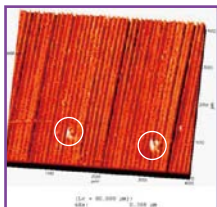


図4●細部はプロフィーポイントを用います。


## 本当にインプラントに使っても大丈夫？

2社のインプラント体のネック部を①歯磨ペースト ②天然歯用 PMTC ペースト ③インプラントペースト の3種類のペーストをそれぞれ2,000回転で研磨し、インプラントネックの表面変化を電子顕微鏡で分析した結果、インプラントペーストはクリーニング効果とインプラント表面の面粗さの減少においてバランスがとれていることがわかりました。（当社比）


①歯磨ペースト(実験後)



②PMTCペースト(実験後)

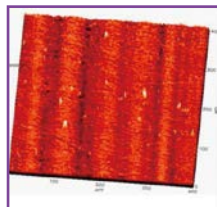

③インプラントペースト(実験後)

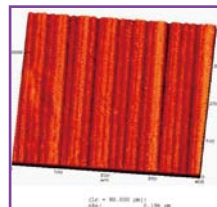

### チタン製 インプラント専用スクーラー インプラントスクーラー-J

- 標準価格：各12,800円
- 種類：6種類
- 一般的名称：歯科用スクーラー ●販売名：インプラントスクーラー
- 届出番号：13B1X00005000173（一般医療機器）
- 製造販売元：(株)ヨシダ ●製造元：ノードント社



### PMTCスターターキット プロフィーポイント

- 標準価格：PMTCスターターキットII A 64,400円  
プロフィーポイント各700円

- 一般的名称：歯磨カップ ●届出番号：13B1X00005000015（一般医療機器）
- 製造販売元：(株)ヨシダ ●製造元：ALLPRO INC
- 一般的名称：ストリートギアードアングルハンドピース
- 承認番号：20900BZZ00015000（管理医療機器 特管）
- 製造販売元：(株)吉田製作所

使用例  
PMTCスターターキット

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●価格は2015年1月現在。消費税は含まれておりません。

禁無断転載

●取り扱いディーラー名

