

デントクラフトから1液型ボンディング材誕生。



歯科用象牙質接着材

デントクラフト Aボンド

DENTCRAFT A-bond

●デントクラフト Aボンド リフィル

1 Step

DENTCRAFT®

デントクラフト Aボンドは
セルフエッチングプライマーとボンディングの機能を備えた
1液型ボンディング材。

●3液型ボンディング材

エッチング

プライマー

ボンディング

●デントクラフトAボンド

エッチング+プライマー+ボンディング



デントクラフト Aボンド キット

●一般的名称: 歯科用象牙質接着材 ●販売名: デントクラフト Aボンド ●認証番号: 225ACBZX00056000 (管理医療機器)
●セット内容: ◎5mL×1本 ◎アクセサリー: 混和皿×1枚、ブラシホルダー×1本、ブラシチップ×50個 ●標準価格: 16,000円

●デントクラフト Aボンド キット

デントクラフト Aボンド リフィル

●内容: ◎5mL×1本 ●標準価格: 14,300円

YOSHIDA

デントクラフト Aボンドの特長と物性

1液型ボンディング材

手間も時間もかからないので、多忙な日常臨床により適したシステムです。

優れた接着性能




実際の口腔環境に近いと言われているサーマル試験後でも、エナメル質・象牙質ともに高い接着強度を実現しました。

10μm以下の被膜厚さ

歯質とボンディング層の境界が目立たず、審美的にもより優れています。

液切れのよいノズル


液垂れにくいノズルなので必要な量だけ採取でき、経済的にも優しくお使いいただけます。

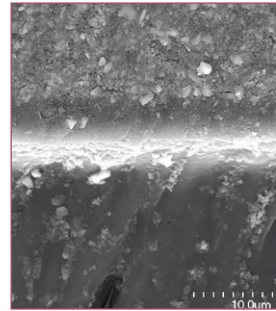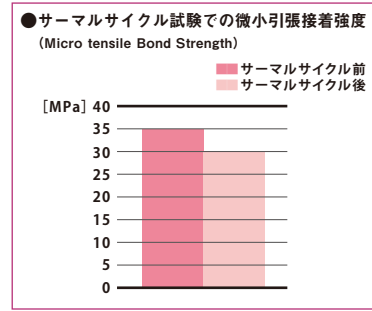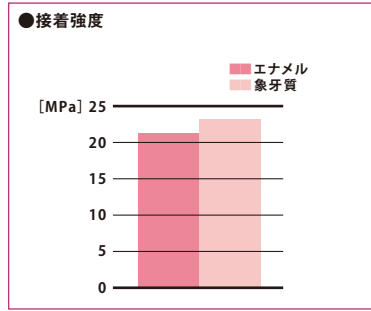


Vericom R&D Center ISO/TS11405 Seoul National University

デントクラフト Aボンドの使用方法ステップ


※お使いにならない時は、フタをしっかりと閉め、冷蔵保管(2~8℃)をお願いします。

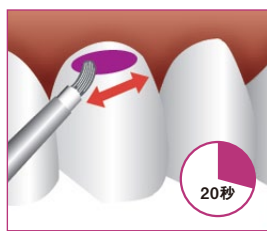

ボンディング材を歯面に20秒間塗布します。

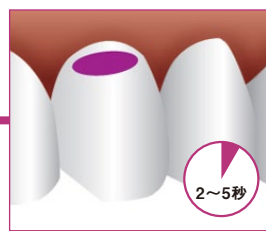

2~5秒間強圧エアブローでボンディング材をうすく広げ、溶剤を揮発させます。

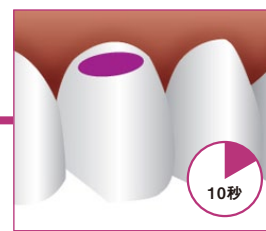

光重合器を用いて、10秒間照射します。
※光照射器の光強度が400mW/cm以上の光重合器を使用した場合。

関連製品のご紹介

光重合型歯科用コンポジットレジン デントクラフト ファインフィル



デントクラフト ファインフィル シリンジキット
●一般的名称: 歯科用充填材料キット
●販売名: デントクラフト ファインフィル
●認証番号: 224ACBZX00061000 (管理医療機器)
●セット内容: ◎4g入シリンジ×5本 (A1, A2, A3, A3.5, B2 各1本)
◎デントクラフト Dボンド5mL×1本 ◎デントクラフト ファインエッチ: 3mL×1本
◎アクセサリー: 湿和皿×1枚、湿和紙×1セット、ブラシチップ×30本、ブラシホルダー×1本、
ディスプレイザブルチップ (デントクラフト ファインエッチ用×10本)
●標準価格: ¥26,000円

デントクラフト ファインフィル シリンジ
●セット内容: ◎4g入シリンジ×1本
●シェード: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, A20, A30, I, P, E
●標準価格: 各 ¥3,300円

光重合型歯科用フロアブルコンポジットレジン デントクラフト ファインフロー



デントクラフト ファインフロー シリンジキット
●一般的名称: 歯科用充填用コンポジットレジン
●販売名: デントクラフト ファインフロー
●認証番号: 225ACBZX00014000 (管理医療機器)
●セット内容: ◎2g入シリンジ×4本 (A2, A3, A3.5, B2 各1本)
◎ディスプレイザブルチップ×20本
●標準価格: ¥11,000円

デントクラフト ファインフロー シリンジ
●セット内容: ◎2g入シリンジ×1本
●シェード: A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, A20, A30, I
●ディスプレイザブルチップ×10本
●標準価格: 各 ¥3,300円

歯科用充填材料キット (歯科用象牙質接着剤) デントクラフト Dボンド

2ステップタイプ

デントクラフト Dボンド
●一般的名称: 歯科用充填材料キット
●販売名: デントクラフト ファインフィル
●認証番号: 224ACBZX00061000 (管理医療機器)
●セット内容: ◎5mL×1本
●標準価格: ¥7,300円



歯科用充填材料キット (歯科用エッチング材) デントクラフト ファインエッチ

デントクラフト
ファインエッチは
リン酸37%のエッチング材。

デントクラフト ファインエッチ エコノミーキット
●一般的名称: 歯科用充填材料キット
●販売名: デントクラフト ファインフィル
●認証番号: 224ACBZX00061000 (管理医療機器)
●セット内容: ◎5mL×5本
◎アクセサリー: ディスボーザブルチップ×20本
●標準価格: ¥4,900円



ハイパワーLED照射器 DC ブルーレックスプラス

ハイパワー 青色LED 搭載

●一般的名称: 歯科用光照射器
●販売名: DCブルーレックスプラス
●届出番号: 13B1X00005000184 (一般医療機器 特管)
●標準価格: ¥98,000円



※色調は印刷のため現品と異なることがあります。また、仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで



(01)02747937011621