

シンプルでシステマチックな TFファイル ラインナップ。




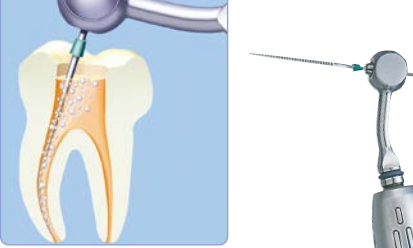

<p>TF スモール アソート</p>  <p>●1プレート:.08/#25、.06/#25、.04/#25各1本入 ●標準価格:8,700円(23mm、27mm)</p>	<p>TF スモール アピカルアソート</p>  <p>●1プレート:.08/#25、.06/#30、.06/#35各1本入 ●標準価格:8,700円(23mm)</p>	<p>TFファイル単品パック</p>  <p>●1プレート:同サイズ3本入り ●標準価格:8,700円(23mm、27mm)</p>																												
<p>TF ラージ アソート</p>  <p>●1プレート:.10/#25、.08/#25、.06/#25各1本入 ●標準価格:8,700円(23mm、27mm)</p>	<p>TF ラージ アピカルアソート</p>  <p>●1プレート:.06/#30、.06/#35、.04/#40各1本入 ●標準価格:8,700円(23mm)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>長さ</th> <th>23mm</th> <th>27mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">テーパ サイズ</td> <td>.12</td> <td>25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>.10</td> <td>25</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>.08</td> <td>25</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>.06</td> <td>35</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>.06</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>.04</td> <td>25</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td></td> <td>40</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td></td> <td>25</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>	長さ	23mm	27mm	テーパ サイズ	.12	25		.10	25	25	.08	25	25	.06	35	35	.06	30	30	.04	25	25		40	40		25	25
長さ	23mm	27mm																												
テーパ サイズ	.12	25																												
	.10	25	25																											
	.08	25	25																											
	.06	35	35																											
	.06	30	30																											
	.04	25	25																											
	40	40																												
	25	25																												

●用語解説

- ◎ネゴシエーション(negotiation) / 穿通のための処置
- ◎シェイピング(shaping) / 根管形成
- ◎リキャプチュレーション(recapitulation) / 再挿ファイリング:もう一度穿通させたファイルに戻って作業長を確認する。

●一般名称:電動式歯科用ファイル ●販売名:TFファイル ●認証番号:224ADBZX00259000(管理) ●製造販売元:カポデンタルシステムズジャパン株式会社 大阪府八尾市神武町2-24

関連商品

<p>ニッケルチタン製 Kファイル NT-Kファイル</p> <p>追随性が高く根管作業長の確認に適しています。また湾曲度が強くなり破折しにくく、高い切削性により、効率的な根管治療が可能になります。</p>  <p>●標準価格:2,000円 [長さ:21mmまたは25mm(#15~40)単品6本入] [アソートパック:21mmまたは25mm(#15~40)各1本入] ●一般名称:歯科用ファイル ●販売名:NT-Kファイル ●届出番号:0883X00011000031(一般) ●製造販売元:(株)サンテック 茨城県行方市岸沢995-1</p>	<p>サリール専用・根管洗浄用エンドホルダー H02</p> <p>今まで困難だった湾曲根管の洗浄が効率よく行えます。</p>  <p>●標準価格:H02・11,400円、K3単品(6本入)8,700円 ●セット内容:K3用チャック、エンドホルダー、レンチ ●承認番号:214008Z00149000(管理) ●製造販売元:(株)ミクロン 東京都大田区池上2-17-7</p>	<p>歯科用根管拡大装置 ジロソニック</p> <p>1,500~3,000Hzの周波数を持つサブソニック振動で内壁面の切削片付着を軽減します。</p>  <p>●標準価格:240,000円 [本体、シェーパースソニックNo.15~40各1本入] ●販売名:ジロソニック ●承認番号:219008ZX01152000(管理 特管) ●製造販売元:(株)ヨシダ</p>
--	--	--

*仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は2016年4月現在。消費税は含まれておりません。


禁無断転載

●お問い合わせは下記まで



3本以下の少ないファイルで
短時間にシェイピング(根管形成)。

TF
根管治療用R相ロータリー
ニッケルチタンファイル
TFファイル
[TWISTED FILES]

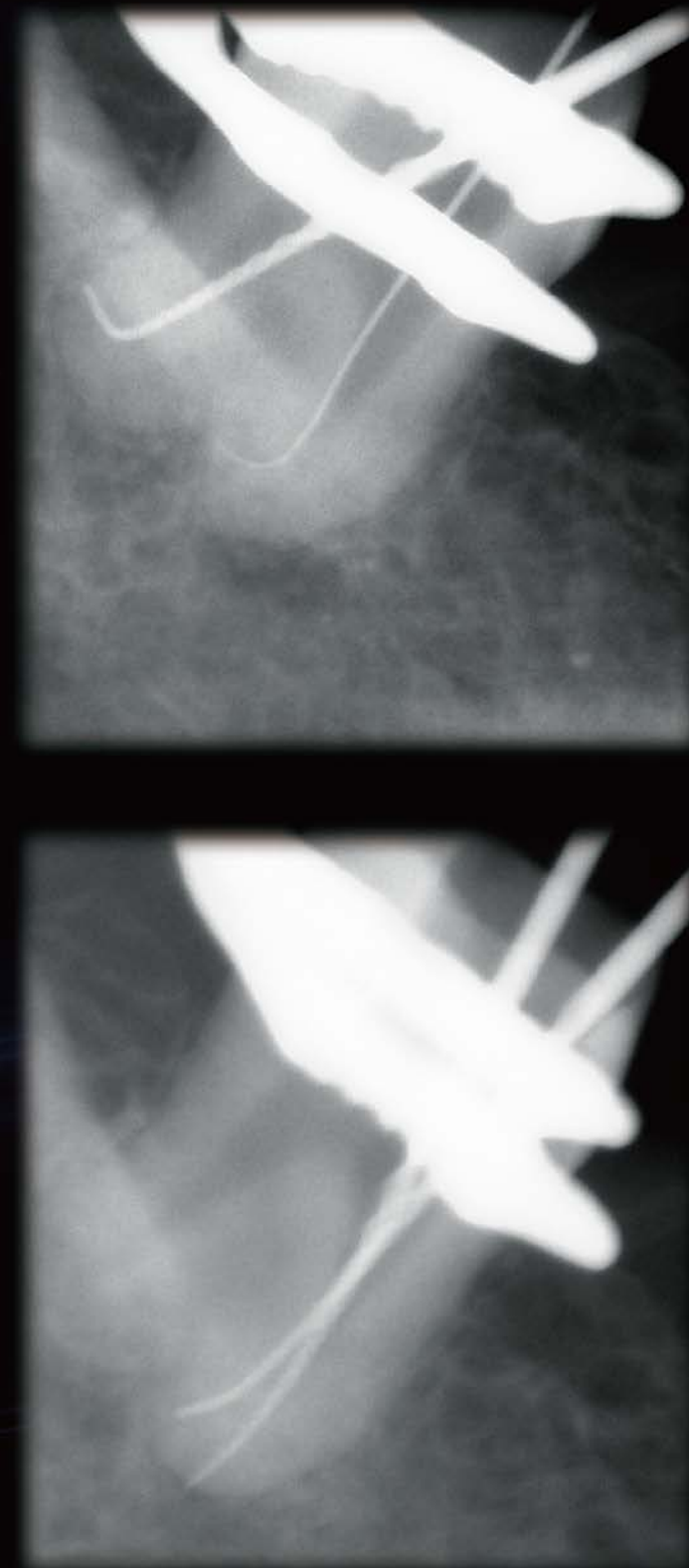




シンプルですばやくシェイピングするためのアイテム。
「ツイスト」という名のTF (TWISTED FILE) ファイルが
精度の高い根管形成を短時間で実現します。



根管形成の前処理

根管形成

根管洗浄・乾燥・根充

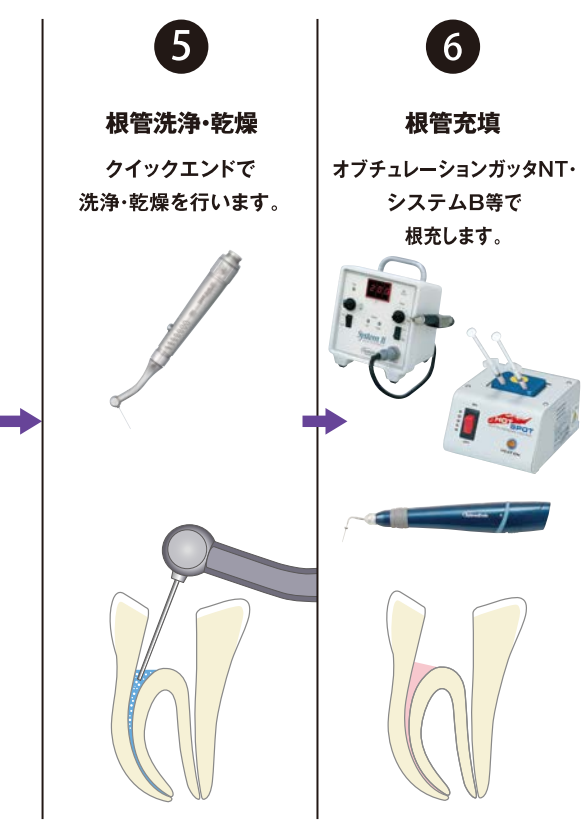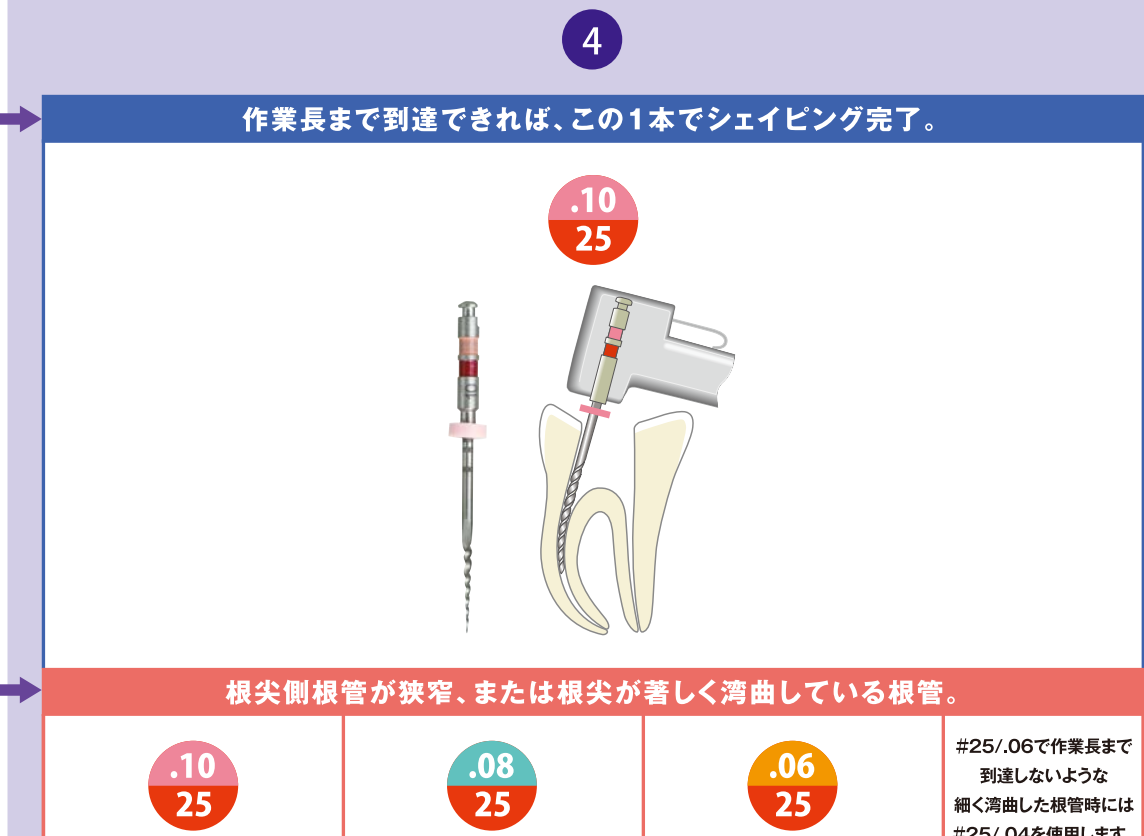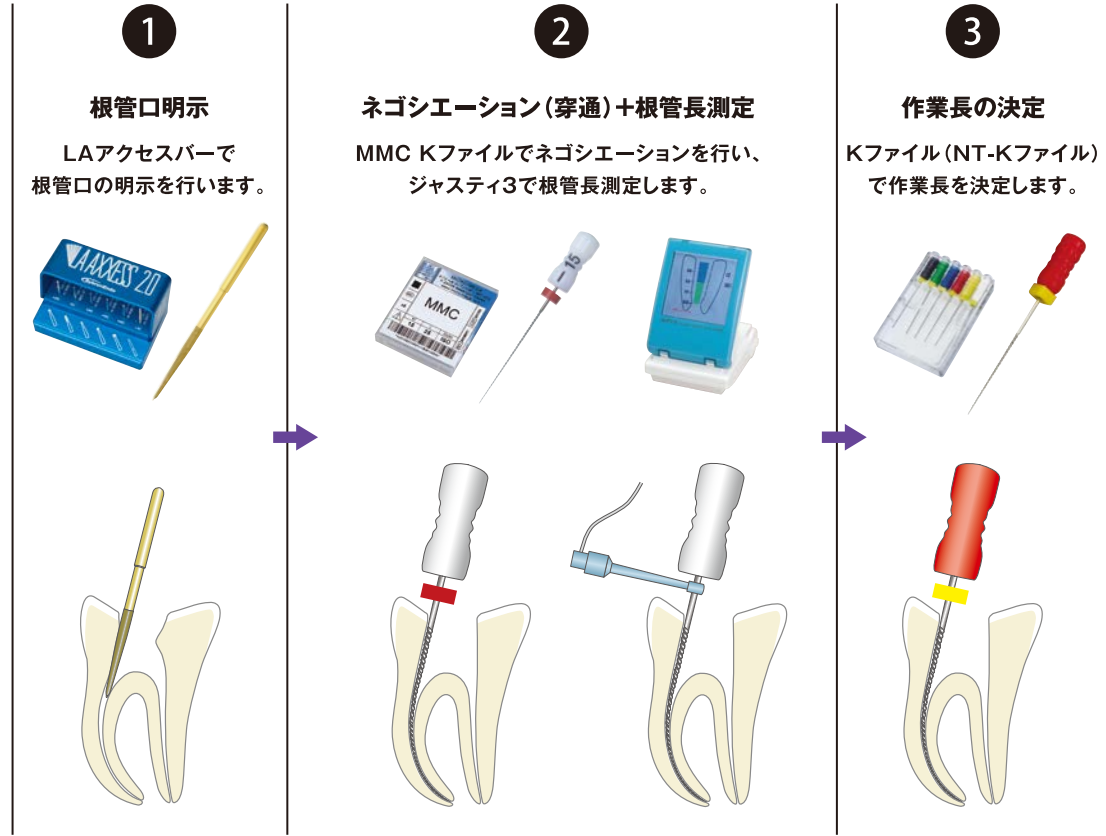

●TFファイル症例




Kファイルにて作業長を決定します。この場合、1本のファイルで根尖まで到達しました。充填。

●TFファイル使用時の注意点


- 根尖径#25以上の場合は、#35 (06/35) または #40 (04/40) を適宜用いる。
- クラウンダウンまたはシングルファイル法を用いる。
- DCスマートエンド等で500回転に設定し、1回に1~3mmの範囲の挿入にとどめ、すぐに引き抜く。
- 切削毎にEDTAを用い、Kファイルでリキャプチャー(作業長の確認)する。
- 上下運動は行わない。
- 何度も同じ深さまで同一ファイルで挿入しない。
- 押し込まない。
- Kファイルで再度穿通性を確認する。

【TFファイルの特長】


ツイステッドデザインが粒子構造を維持
従来の削り出しではなく、ねじり(ツイステッド)加工のため、粒子構造が維持され、マイクロクラックが製造過程で入らずファイル破折を軽減します。

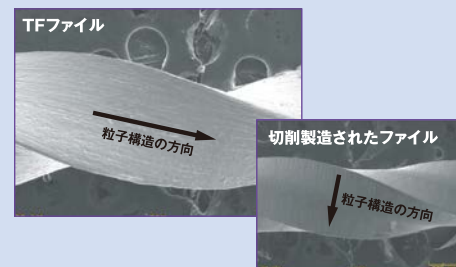


安全性を高めたファイル先端デザイン
根尖変位を起こしにくい先端デザインのため、根管形態に容易に追随します。

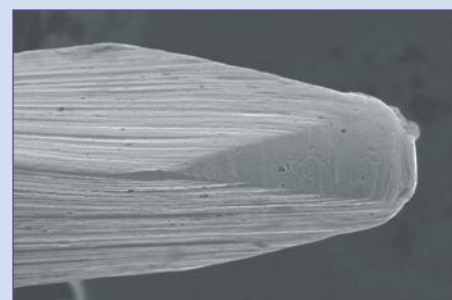

バリエーションヘリカルアングル
ファイル先端部は16.5°、末端部は22°に設定され、より効率的な形成が行えます。

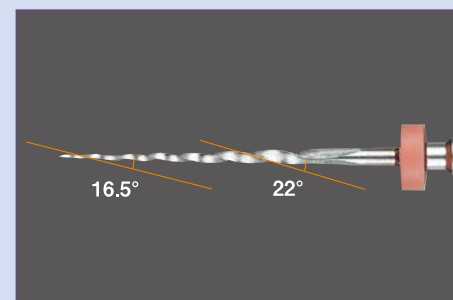

柔軟性比較
従来のNiTiファイルと比較。高い柔軟性があり、湾曲度の強い根管治療にも適しています。

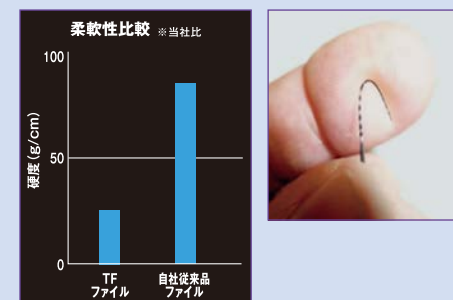

確認しやすいカラーコード
カラーバンドでテーバーと先端サイズを表示。簡単に確認でき、作業効率を高めます。

