

DMG

Luxatemp Series

ルクサテンプ・シリーズ

美しいプロビジョナルを手軽にチェアーサイドで。



美しいプロビジョナルをチェアーサイドで。 最終補綴物のために。咀嚼機能や歯周組織の環境を整えます。

前歯部症例



歯周初期治療終了後の上顎歯列の状態。



審美診断に基づきデザインワックスアップを行う。



ワックスアップ模型で製作したシリコンインデックスに、ルクサテンプを填入する。

臼歯部症例



FRPとCRLレジンによる支台築造を行い、前装冠の支台歯形成を終えた状態。




支台歯形成を終えたら、根管治療前に採得し保管していたシリコン印象の対象歯部にルクサテンプを填入する。



印象体を口腔内に戻した後、約2分で撤去する。この保持時間が要点で、硬化が進むと撤去が難しくなる。この状態でも変形しないのがこの材料の良さである。

インプラントプロビジョナル症例

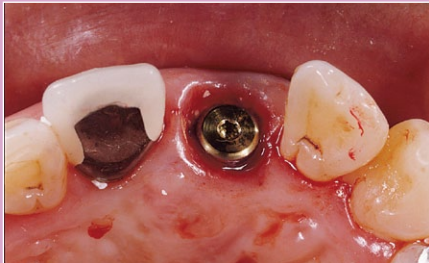

①を抜歯後リプレイスインプラントを即時埋入。



手術直後にルクサテンプを用いプロビジョナル作製を行う。



①にプロビジョナル装着直後。早い段階でのセットは歯肉形態の保存と誘導に役立つ。

プロビジョナル用レジン

ルクサテンプ プラス・オートミックス

DMG



審美性と操作性に優れたプロビジョナル用レジン「ルクサテンプ・オートミックス」。

審美性に優れています。

歯頸部と歯間部でシェードに変化のあるテンポラリークラウン・ブリッジ、プロビジョナルが作製できます。70%の極小フィラー配合で低吸水性のため、長期にわたる症例でも変色がほとんどありません。

オートミックスタイプで操作性に優れています。

先端が細いチップで最適な練和状態の材料を流し込むため手軽にチェアーサイドで作製できます。気泡の混入が少なく細部まできれいに充填できます。

重合収縮が少なく物性に優れています。

キャタリスト比(1:10)が少ないため、重合収縮による歪みやたわみの少ないロングスパンのプロビジョナルが作製できます。






直接法にてルクサテンプを口腔内で硬化。不快な味や発熱が軽減されている。



非常に精密なマージンラインが製作可能となる。



2回目のプロビジョナルの前歯歯列。健康な歯周組織と理想的な歯肉形態が得られた。

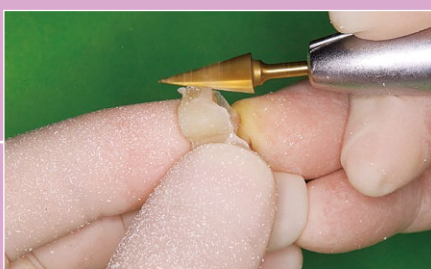

ハンドピース用のカーバイトバーを使って歯頸部の形態を整える。



隣接面の連結部形態はレンズ型ダイヤモンドポイントの使用が便利である。作製を終えた 543 のプロビジョナル。



口腔内に装着したプロビジョナル。




1手術から5ヶ月後。インプラント周囲組織は 1 と相似形に誘導されている。



最終補綴物装着から6年後。プロビジョナルの役割を改めて認識することができる。

●作業工程と作業時間

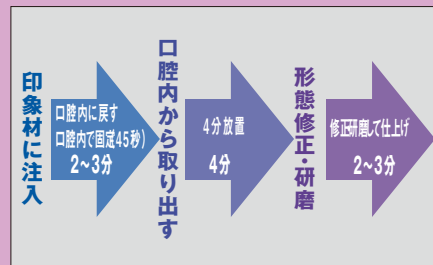

修理・補修用レジン

ルクサフロー スター




ビスアクリレート性暫定修復物の修理・補修用テンポラリーレジン。



フルオレッセンス(蛍光性)配合。

フルオレッセンス(蛍光性)配合で審美性に優れています。

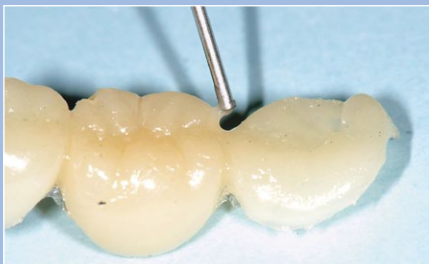

ルクサテンプを使用したテンポラリーブリッジの気泡の穴埋めに使用中。



既存の補綴物を複製したテンポラリークラウンの形態修正に使用。

歯科用接着充填材料

テンポセム NE ハンドミックス/テンポセム NE スマートミックス

クラウン・ブリッジ・インレー・アンレー等の
暫間補綴物の仮着に。

長めの硬化時間。

硬化時間が4~5分と長めのため、単冠からロングスパンのブリッジまでの仮着が容易に行えます。

生体に優しいノーユージノール。

ノーユージノールのため、生体に優しくテンポラリーを変色させません。

TempoCem



テンポセム NE ハンドミックス



テンポセム NE スマートミックス



オートミックスのため、直接プロビジョナルの
内面へ押し出します。



チップの先端を用いて均等に広げます。



硬化後は探針等で容易に除去が可能
です。



全顎におよぶ多数歯の仮着には特に
適しています。

ルクサテンプ・オートミックスの物性

- 混合比率：1：10（キャタリスト：ベース）●圧縮強さ：250MPa●横強度：91.5MPa●引っ張り強さ：36MPa
- バーコール硬度：37●吸水率：10μg/mm³●重合中の温度上昇限度：38℃

ルクサテンプ プラス・オートミックス

- ◎イントロキット（A2カートリッジ（76g）：1本、ディスペンサー：1個、オートミックスチップ：15本）●標準価格：27,300円
- ◎リフィールパック●A1/A2/A3/A3.5/B1/ブリーチング色（単色カートリッジ（76g）：1本、オートミックスチップ：15本）●標準価格：各18,750円
- 販売名：ルクサテンプ プラス●一般的名称：歯科汎用アクリル系レジン●認証番号：220AKBZX00083000

ルクサフロー スター

- ◎イントロダクトリーパック●セット内容：1.5g入シリンジA1、A2、A3.5、B1各1本、ルアーロックチップ20個●標準価格：11,650円
- ◎ルクサフロー スターリフィール単品●セット内容：1.5g入シリンジ同色2本、ルアーロックチップ10個●標準価格：各6,600円
- 一般的名称：歯科汎用アクリル系レジン●承認番号：21800BZY10156000

テンポセム NE ハンドミックス

- セット内容：ベース材85g、キャタリスト25g●標準価格：10,050円

テンポセム NE スマートミックス

- セット内容：テンポセム NE スマートミックスシリンジ（11g）2個、テンポセム NE スマートミックスチップ（ショート）20個●標準価格：10,500円●販売名：テンポセム NE
- 一般的名称：歯科用酸化亜鉛非ユージノールセメント●認証番号：220AKBZX00143000

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで

◎製造販売元：

株式会社 **ヨシダ** <http://www.yoshida-dental.co.jp>
〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.03-3845-2931（器材営業本部）
●製造元：DMG社

