

タービンやマイクロモーターハンドピースの

メンテナンスの お悩みを解決!

私が注油するより、
早く確実に
注油してくれる!

使用は簡単なので
毎日のメンテナンスが
楽になりました。

チャック部への
注油も簡単です。

自動注油でタービン、
ハンドピースを
よりよい状態に
保ちます。



最短 **15**^{*}秒!
タービン1本を
自動注油

※タービンの場合

マイクロモーターハンドピース
の場合は85秒(ライトモード)、
145秒(ヘビーモード)が標準
作業時間です。



スプレー注油の場合と違って、
スタッフによって
スプレー時間やスプレー方法の
ばらつきがなくなり、
しっかり注油できるので
安心です!



ハンドピース自動注油システム

フレッシュケア^{プラス}

ハンドピースのトラブル予防に、 自動注油システムで簡単・確実なメンテナンス。

シンプル操作で、簡単に確実なハンドピースの注油作業が可能です。



STEP 1
ハンドピースをセット



STEP 2
フィルターを装着し扉を閉める



STEP 3
セレクトボタンで注油するハンドピースを選んで、
スタートボタンを押すだけで操作完了

どなたでも
ラクラク、
カンタン操作!



注油から余分な油の除去まで、自動で行えます。

1

ハンドピースを
セットします

2

注油
オイルと
エア圧力で
隅々まで注油

3

エアブロー
ハンドピース内の
余分な油を排出

タービン ——— 15秒
マイクロモーター — 85秒～
で注油完了!

+

マイクロモーターハンドピース
エアブロー調整モード

マイクロモーターハンドピース内の
オイル抜き時間を35～110秒で調整

チャック用ノズル



付属のチャック清掃ノズルを
使用(手動)し、チャック内部の
汚れや摩耗粉を除去できます。

ハンドピースを同時に4本セット可能



オイルボトル

従来のスプレーオイル使用時に比べ1回
あたりのオイル使用量が少なく、大幅に
コストが抑えられます。

- スプレーオイル
1回 — 20円
- フレッシュケア プラス
1回 — 4.3円

※交換式オイルボトル
500mL/6,000円



オイル飛散防止
フィルター

注油オイルの飛散を軽減します。

使いやすい前面ドア

ハンドピースの出し入れがやすく、
お手入れも簡単。

フレッシュケア+
プラス

フレッシュケア プラス仕様

- 装着本数…ハンドピース4本
- 注油時間…タービン:15秒
マイクロモーターハンドピース:85秒(ライトモード)
145秒(ヘビーモード)

- 供給エア圧力…0.4～0.6Mpa
- 付属品カップリング…タービン用2個、
マイクロモーターハンドピース用2個、チャック用ノズル1個
- オイルタンク容量…500mL(タンク毎交換)

- 電源電圧…AC100V 50/60Hz
- 消費電力…30VA
- 寸法…W280×D275×H308mm
- 重量…5.9kg

オプション・別売品

- オイルボトル
- タービン用アダプター(ST)
- マイクロモーターハンドピース用アダプター
- エアスケーラー用アダプター(LUX)
- エアスケーラー用アダプター(ST)

標準価格 198,000円

禁無断転載

取扱店名

発売元 / 株式会社 **ヨシダ** 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.03-3845-2941 (機械部)

製造元 / 株式会社 吉田製作所



2016年11月/PRO/30/@20/新 (01)02747937014851