

YOSHIDA

+SWISS
Quality

NITRADINE®

Patented disinfecting formula

義歯洗浄剤 / 可撤式矯正装置・マウスガード用洗浄剤

ニトラディン

過酸化系

弱酸性



OK



OK



OK



20錠入り

その義歯洗浄剤
微細孔の中まで
キレイにできていますか？



ortho & JUNIOR




DENTURES






微細孔の中まで洗浄できるヒミツは？

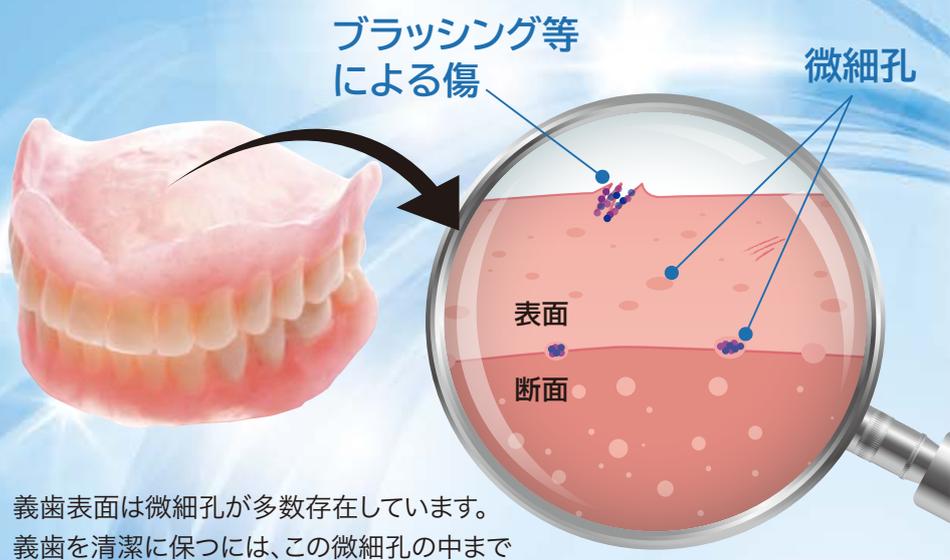

義歯表面は微細孔が多数存在しています。義歯を清潔に保つには、この微細孔の中まで洗浄する必要があります。ニトラディンは、義歯を傷つけずに微細孔まで強力洗浄します。

ニトラディン使用による義歯バイオフィルムの減少

義歯表面積のバイオフィルム付着[%]

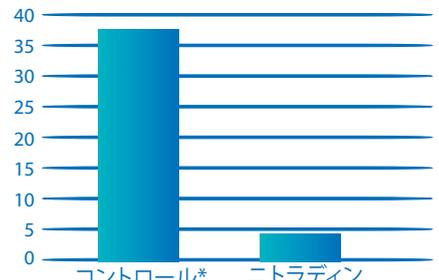


*1日3回義歯ブラシで義歯を清掃


Silva-Lovato CH1, Wever Bd, Adriaens E, Paranhos Hde F, Watanabe E, Pisani MX, Souza RF, Ito IY. "Clinical and antimicrobial efficacy of NitrAdine™-based disinfecting cleaning tablets in complete denture wearers." J Appl Oral Sci. 2010 Dec;18(6):560-5.



15分で義歯を強力洗浄！

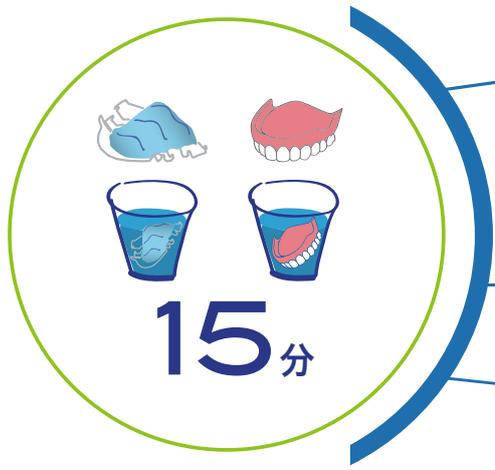

義歯表面の微細孔に浸透

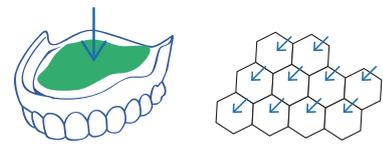

バイオフィルムを破壊

微生物を洗い流す



使用方法

義歯を義歯ブラシでよく磨いてから、ニトラディンをご使用ください。

1. 水150mLを入れたコップにニトラディンを1錠入れ、義歯を浸します。
2. 15分間そのままにしておきます。
3. 義歯を取り出し、流水下で十分洗ってから口腔内に装着してください。

※洗浄後、味が気になる場合は、水に10分程度浸してからご使用ください。
 ※義歯1床に対して1錠をご使用ください。
 ※矯正装置やスプリントにもご使用いただけます。



患者さん向けリーフレットをご用意しています

内容量:20錠入り
 成分:ペルオキシ-硫酸カリウム、硫酸塩、リン酸水素二カリウム、コーンミント油、ハッカ油が含まれています。
 注意事項:口腔内に本剤を入れないでください。使用済み洗浄液は捨ててください。本剤の成分または過硫酸塩に対してアレルギーがある場合には使用しないでください。本剤の粉末が眼損傷を引き起こす場合があります。本剤の使用によって、刺激・腫れ・痛みを生じた場合には使用を中止して医療機関を受診してください。

●お問い合わせ先

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

禁無断転載



(01)02747937015384