

YOSHIDA

Piezo Tip Guide Book


ピエゾ チップガイド ブック




チップの特徴

チップの高い精度

表面の工作精度を高めた鏡面仕上げのチップが、精度の高い治療を実現します。

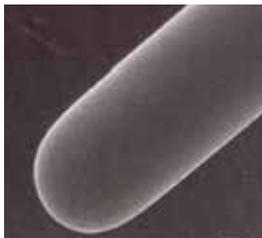

チップ拡大 x100倍

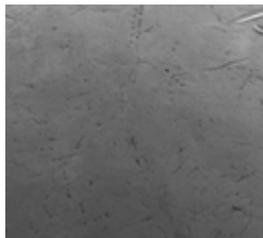

チップ拡大 x1000倍



根面スケーリング後


理由は？

- 根面セメント質の過剰な除去を回避します。
- 根面をスムーズに仕上げ、細菌の再付着を遅延させます。
- 根面に対して穏やかなアプローチができます。

Point

- ◎ 超音波スケーラー用チップは、すべて消耗品です。
チップが2mm減ると、作業効率が減少します。
- ◎ **チップの機能を100%発揮するためにはチップの定期的な交換が必要です。**
「プチピエゾチップ消耗ガイド」でチップの消耗をご確認ください。
- ◎ 消耗したチップを新しいチップに交換すると…
歯石除去が早く、時間の節約と術者の疲労軽減につながります。

※ 名刺サイズの「チップ消耗ガイド」もご用意しております。

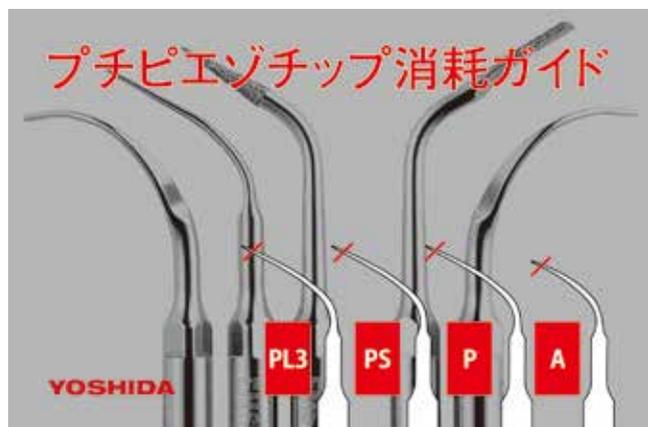

プチピエゾチップ消耗ガイド

YOSHIDA

PL3


PS

P


A

※ 原寸サイズ

チップの適応部位

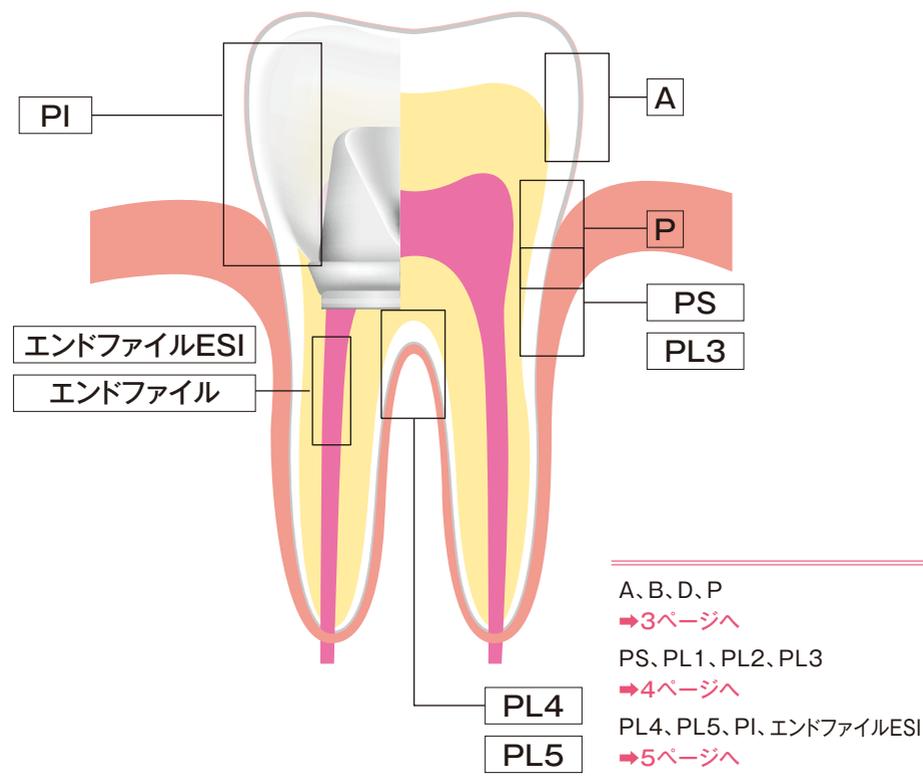

- A、B、D、P
→3ページへ
- PS、PL1、PL2、PL3
→4ページへ
- PL4、PL5、PI、エンドファイルESI
→5ページへ

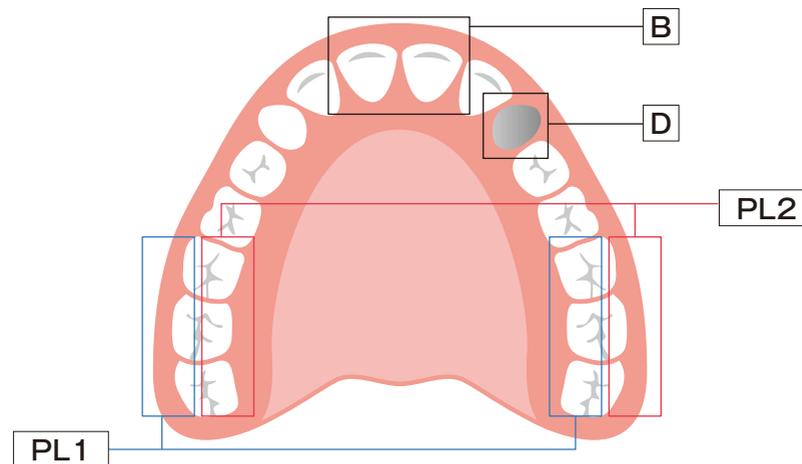


種類	用途・内容
チップA 歯肉縁上の歯石除去  <ul style="list-style-type: none"> ●商品名 ブチピエゾ用チップA トルクレンチ付 単品 ●販売名 グラッド ピエゾ プラス 	 <p>チップの側面を歯面に平行にあて、前後に動かしながら使用します。 ※注水下でご使用ください</p> <p>883657 詳しい動画はこちら▶ </p>

チップB 前歯舌側面の歯石・ステイン除去  <ul style="list-style-type: none"> ●商品名 ブチピエゾ用チップB トルクレンチ付 単品 ●販売名 グラッド ピエゾ プラス 	 <p>チップ先端部を歯面に垂直にあてて使用します。 ※注水下でご使用ください</p> <p>883664 詳しい動画はこちら▶ </p>
---	---

チップD 補綴物の除去  <ul style="list-style-type: none"> ●商品名 ブチピエゾ用チップD トルクレンチ付 単品 ●販売名 グラッド ピエゾ プラス 	<p>チップ先端の平らな面を補綴物に垂直にあてて発振させ、 発振音が聞こえなくなるまで圧をかけ、 その後は2秒間発振させます。</p> <p>883689 詳しい動画はこちら▶ </p>
---	---

チップP 歯肉縁上・歯肉縁下3mmまでの歯石除去  <ul style="list-style-type: none"> ●商品名 ブチピエゾ用チップP トルクレンチ付 単品 ●販売名 グラッド ピエゾ プラス 	 <p>歯肉縁下3mmまでのポケットに使用します。 チップの側面を歯面に平行にあて、前後に動かしながら使用します。 ※注水下でご使用ください</p> <p>883739 詳しい動画はこちら▶ </p>
---	--

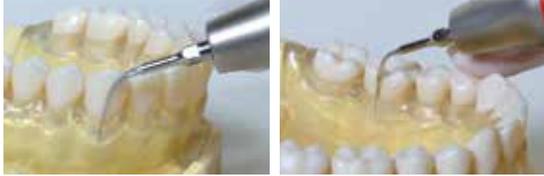種類	用途・内容
チップPS 歯肉縁下10mmまでの歯石除去  <ul style="list-style-type: none"> ●商品名 ブチピエゾ用チップPS トルクレンチ付 単品 ●販売名 グラッド ピエゾ プラス 	 <p>歯肉縁下10mmまでのポケットに使用します。 作動させずにチップをポケット底まで入れてから、チップ側面を歯面に平行にあて、前後に動かしながら使用します。 ※注水下でご使用ください</p> <p>883746 詳しい動画はこちら▶ </p>

チップPL1 臼歯遠心部の歯石除去  <ul style="list-style-type: none"> ●商品名 ブチピエゾ用チップPL1 トルクレンチ付 単品 ●販売名 グラッド ピエゾ プラス 	 <p>下顎:左側頬側近遠心部・右側舌側近遠心部、 上顎:左側舌側近遠心部・右側頬側近遠心部に使用します。 ※注水下でご使用ください</p> <p>883753 詳しい動画はこちら▶ </p>
---	--

チップPL2 臼歯遠心部の歯石除去  <ul style="list-style-type: none"> ●商品名 ブチピエゾ用チップPL2 トルクレンチ付 単品 ●販売名 グラッド ピエゾ プラス 	 <p>下顎:右側頬側近遠心部・左側舌側近遠心部、 上顎:右側舌側近遠心部・左側頬側近遠心部に使用します。 ※注水下でご使用ください</p> <p>883761 詳しい動画はこちら▶ </p>
--	---

チップPL3 根面のバイオフィルム除去  <ul style="list-style-type: none"> ●商品名 ブチピエゾ用チップPL3 トルクレンチ付 単品 ●販売名 グラッド ピエゾ プラス 	 <p>作動せずにチップをポケット底まで挿入させてから、 チップの側面を歯面に平行にあて、根面に沿うように使用します。 ※注水下でご使用ください</p> <p>883778 詳しい動画はこちら▶ </p>
---	--

チップPL4

根分岐部の歯石除去・バイオフィルム除去



- 商品名 プチピエゾ用チップPL4 トルクレンチ付 単品
- 販売名 グランド ピエゾ プラス



大臼歯の根分岐部に使用します。
押付けすぎずに分岐部に触れるように優しくあてます。
※注水下でご使用ください

883785

詳しい動画はこちら▶



チップPL5

根分岐部の歯石除去・バイオフィルム除去



- 商品名 プチピエゾ用チップPL5 トルクレンチ付 単品
- 販売名 グランド ピエゾ プラス



大臼歯の根分岐部に使用します。
押付けすぎずに分岐部に触れるように優しくあてます。
※注水下でご使用ください

883792

詳しい動画はこちら▶



チップPI

インプラント上部構造に付着したブランクおよび歯石除去



- 商品名 プチピエゾ用チップPI インプラント用(4本入)
- 販売名 グランド ピエゾ プラス



インプラント上部構造に沿うようにチップをあてて、前後に動かしながら使用します。

※注水下でご使用ください ※ご使用の際は別売りの「プチピエゾ用チップ120」が必要です。

426741

詳しい動画はこちら▶



エンドファイルESI

根管洗浄



- 商品名 プチピエゾエンドファイルESI 根管洗浄用(6本入)
- 販売名 グランド ピエゾ プラス

拡大・形成した根管に挿入し、水を攪拌するように左右に動かして使用します。

※注水下でご使用ください

※ご使用の際は別売りの「プチピエゾ用チップ90」または、「プチピエゾ用チップ120」が必要です。


426765

詳しい動画はこちら▶



エンドファイル

根管拡大用

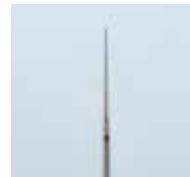

- 商品名 プチピエゾエンドファイル #15,#20,#25,#30,#35
- 販売名 デントクラフト プチピエゾ

※ご使用の際は別売りの「プチピエゾ用チップ 90」または「プチピエゾ用チップ 120」が必要です。



791792

791803

791811

791828

791835

ファイルのホルダー

チップ180



- 商品名 プチピエゾ用チップ 180
- 販売名 グランド ピエゾ プラス

426758

チップ120



- 商品名 プチピエゾ用チップ 120
- 販売名 グランド ピエゾ プラス

791761

チップ90



- 商品名 プチピエゾ用チップ 90
- 販売名 グランド ピエゾ プラス

791778

エンドチップスパナ

チップ90～180にファイルを着脱する際に使用するスパナです。

ファイル長さを計る目盛りつき。



- 商品名 プチピエゾエンドチップスパナ
- 販売名 グランド ピエゾ プラス

791785

トルクレンチ(プラスチック)

チップ各種をハンドピース本体へ安全・確実に着脱するための専用トルクレンチです。



- 商品名 プチピエゾ用トルクレンチ(プラスチック)
- 販売名 グランド ピエゾ プラス

883828

YOSHIDA

Piezo Tip Guide Book

-
- 一般的名称：歯科用多目的超音波治療器 販売名：グランド ピエゾ プラス 認証番号：228ALBZX00013000(管理 特管)
 - 一般的名称：歯科用多目的超音波治療器 販売名：デントクラフト プチピエゾ 承認番号：21000BZY00526000(管理 特管)

●製造販売元：  株式会社 **ヨシダ** 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9

ヨシダ取扱製品に関するお問い合わせは 株式会社ヨシダ コンタクトセンター ☎ **0120-178-148**

※対応時間／月～金 9:00～19:00 土 9:00～17:00(日曜・祝祭日を除く)



※仕様および外観は製品改良等のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 **禁無断転載**

C02150/2019年10月/PRI/40/@30/改