

印象体・技工物の除菌 | Impression disinfection



MD 520 impression disinfection

■ インプレッション | 印象体・技工物の除菌



各種印象体と補綴物の除菌液です。
有効成分: 有機酸、界面活性剤

商品: MD520インプレッション 容量2.5L (商品コード 425955) 価格7,700円

Disinfection	Cleaning	Bactericidal	Tuberculocidal	Fungicidal	※1 エンベロープウイルス HBV HCV HIV Limited virucidal (enveloped viruses incl. HBV/HCV/HIV)	Biodegradable	Reaction time	ドイツ 応用 衛生 協会 認定 Meets German standard
除菌	洗浄	細菌	結核菌	※2 真菌	○	生分解性	作用時間 5分 ^{※3} 10分 ^{※4}	○

※1 ドイツのロベルト・コッホ研究所による推奨 (ドイツ健康白書 47, 62- 66, 2004)
※2 カンジダアルピカンス菌での実験結果、※3 結核菌を含む時間、※4 ハイゴジェットでの作用時間は10分です

上記データはドイツの外部研究機関、およびデュールデンタル社の研究所にて調査した結果です。

実験結果の資料はデュールデンタルのホームページよりダウンロードいただけます。

- アルジネート、シリコン、ポリエチレンゴム、親水コロイド、ポリサルファイド、各補綴物に使用できます。また印象体はトレーと一緒に除菌できます。
- 印象体のインプボウルおよびハイゴボックスでご使用いただけます。インプボウルまたはハイゴボックスでご使用の場合、対象物を5分間浸漬させます。

Disinfection bowl

■ インプボウル | 印象体用除菌缶



印象体の浸漬除菌用の容器
サイズ: 1L



- 1リットルの除菌液「MD520インプレッション」を入れ、印象トレーを一度に2つまで蓋に掛けて、液に漬ける。5分後に取り出す。
- 蓋に使用中の赤いサイン付き。

商品: インプボウル (商品コード 425948) 価格5,900円

Hygobox

■ ハイゴボックス | 洗浄・除菌・消毒専用容器 (イエロー)



印象体などと器具を除菌、運搬、一時保管するための専用容器です。サイズ: 3L
外寸: 幅32.5×奥行21×高さ13cm
カゴ: 幅24×奥行15×高さ10.5cm



- かごを上げた状態で固定でき、ボックス内で水切りができます。
- 水切り孔は、インスツルメントが引っかからないように考慮されています。
- 人間工学に基づいた持ち運びがしやすいデザインです。

商品: ハイゴボックス (蓋イエロー) (商品コード 426360) 価格9,800円



(01)02747937016817

CO2111/2019年4月 / @20/ 00/ 新

デュールデンタル
DÜRR DENTAL SE (ドイツ)
74321 Bietigheim-Bissingen
Höpfigheimer Strasse 17
www.duerr.co.jp

