



## シリンジとカートリッジ両方使用可能。

付属のラックを交換するだけで、シリンジとカートリッジどちらも使用可能です。

シリンジ用



カートリッジ用



## 2つの便利なタイマー機能。

### 予約タイマー

最大99時間前から予約可能。帰宅前にタイマーをセットしておけば、朝一や休日明けの診療開始時も安心です。  
(1時間単位/最大99時間)



### お知らせタイマー

スタートしてから設定した時間が経過すると音でお知らせします。硬化時間のお知らせなどに便利です。  
(1分単位/最大99分)



## 独立プログラムで使える2槽構造。

2槽でそれぞれ異なる温度・ポイル時間が、フルオートで可能です。  
※独立プログラムはフリープログラムモードのみのご使用になれます。


## 一目で工程がわかるLEDランプ。

速くからでも認識できる大型LEDランプを採用。工程がひとめでわかります。



### 大容量かつコンパクト

一度に20本のカートリッジをポイル・保存可能です。しかもコンパクトサイズ。

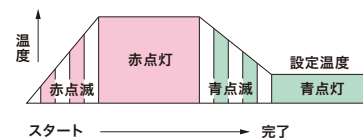

## 予約タイマー機能付。

最大99時間前から予約可能です。(1時間単位/最大99時間)



アップ/ダウンスイッチを押してタイマーの長さを選ぶだけの簡単操作。

※槽1と槽2で異なる予約タイマーは設定できません。

### てきおん君ホワイト・てきおん君カートリッジホワイト共通

## プログラムを選ぶだけの簡単操作。

プログラムNo.	ポイル時間	設定温度
0 (フリープログラム)	● 1~60分	※30℃~80℃
1	🕒 12分	60℃
2	🕒 10分	60℃
3	🕒 12分	58℃
4	🕒 10分	58℃
5	🕒 12分	56℃
6	🕒 10分	56℃

※室温が高い場合、30℃近くの設定温度がコントロールできない場合があります。  
※てきおん君カートリッジ ホワイトは、2槽別々のプログラム設定はできません。

てきおん君ホワイト・てきおん君カートリッジホワイト共に、様々な寒天に対応できる6つのプログラムが予め記憶されています。フリープログラムは先生のお好みに応じて自由に設定いただけます。



DC てきおん君 ホワイト



DC てきおん君  
カートリッジ ホワイト

DC てきおん君 ホワイト  
仕様

●標準価格:99,800円 ●本体寸法:W143mm×D220mm×H211mm ●本体重量:約1.8kg ●電源:AC100V 50/60Hz ●消費電力:170W ●ヒューズ:125V 3A×2本  
●印象材容量:シリンジ最大6本/カートリッジ最大12本 ◎販売名:てきおん君 ◎一般的名称:歯科材料加温器 ◎届出番号:14B2X90011000001(一般)

DC てきおん君 カートリッジ ホワイト  
仕様

●標準価格:99,500円 ●本体寸法:W120mm×D140mm×H120mm ●本体重量:約1.2kg ●電源:AC100V 50/60Hz ●消費電力:170W ●ヒューズ:125V 3A×2本  
●印象材容量:カートリッジ最大20本 ◎販売名:てきおん君カートリッジ ◎一般的名称:歯科材料加温器 ◎届出番号:14B2X90011000002(一般)

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

価格は2018年2月現在。消費税は含まれておりません。

禁無断転載

●取扱店

ヨシダ取扱製品に関するお問い合わせは  
株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

**0120-178-148**

※対応時間 / 月~金 9:00~19:00 土 9:00~17:00  
(日曜・祝祭日を除く)



(01)02747937016022