

**YOSHIDA**

歯科材料加温器

# カルセット

CR、ポーセレンラミネートベニア、  
麻酔カートリッジを温める専用加温器



※写真のCRは別売です

CR シリンジトレーセット



※写真のベニアは別売です

ポーセレンベニアトレーセット

*Warming up to better dentistry*

流動性の変化



通常の状態



温めた後の状態

約 14 分※で目的の温度に！

レジン(樹脂)の流動性が良くなり

細部まで充填がしやすくなります。 ※室温や条件によって目的温度に到達する時間は、多少異なります。



写真提供：青島 徹児 先生

加温するだけ。普段ご使用の材料が適切な使用状態に。

## ■3段階の温度設定

電源 / コントロールスイッチ

スイッチを押す回数で、電源のオンオフと設定温度の変更ができます。



主電源 LED ランプ  
温度表示 LED ランプ  
設定温度によって色の異なる LED ランプが点灯します。

スイッチを押す回数	LED 色	温度	材 料
1 回	グリーン	37℃	麻酔カートリッジ
2 回	オレンジ	54℃	-
3 回	レッド	68℃	CR シリンジ CR コンピュールタイプ ポーセレンベニア*

※ポーセレンベニアはトレーに蓋をした状態で3分間加温後使用してください。  
※温度管理指定のある材料は、指定に沿ってご使用ください。

## ■用途に応じてカスタム可能

ヒーターベースが1つあれば、各トレーを設置できます。用途や材料ごとに自由に組み合わせてご使用いただけます。

### [ CR シリンジの加温 ]

CR シリンジトレーセット  
セット内容：CR シリンジトレー、  
ヒーターベース、電源コード  
標準価格：69,800 円



### [ 麻酔カートリッジの加温 ]

(単品販売)  
麻酔カートリッジトレー  
+  
ヒーターベース  
+  
電源コード



### [ CR コンピュールタイプの加温 ]

(単品販売)  
CR コンピュールタイプトレー  
+  
ヒーターベース  
+  
電源コード



### [ ポーセレンベニアの加温 ]

ポーセレンベニアトレーセット  
セット内容：ポーセレンベニアトレー、  
ヒーターベース、電源コード  
標準価格：69,800 円



## ■単品もご用意しています

### CR シリンジトレー

標準価格 24,200 円



最大 7 本まで同時加温可能

### ポーセレンベニアトレー

標準価格 24,200 円



最大 10 個まで同時加温可能

### CR コンピュールタイプトレー

標準価格 24,200 円



最大 4 個まで同時加温可能

### 麻酔カートリッジトレー

標準価格 24,200 円



最大 3 本まで同時加温可能

### ヒーターベース

標準価格 45,200 円

サイズ  
φ63mm × H25mm  
重 さ  
約 80g



### 電源コード

標準価格 14,200 円



### カルセット 仕様

●入力電源：AC100V 50/60Hz ※各トレーはオートクレーブ滅菌可能です。ヒーターベースは滅菌できません。  
◎販売名：カルセット ◎一般の名称：歯科用材料加温器 ◎届出番号：13B1X00005000217 (一般)  
◎製造販売元：株式会社ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

価格は2018年6月現在。消費税は含まれておりません。

禁無断転載

●取扱店

ヨシダ取扱製品に関するお問い合わせは  
株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター  
**0120-178-148**  
※対応時間 / 月～金 9:00～19:00 土 9:00～17:00  
(日曜・祝祭日を除く)



(01)02747937016220

C02054/2018年6月/PRI/20/@20/新