

ファイン、エクストラファインの主成分はグリシン。
塩辛さがないので、お子さまへの使用もおすすめです。



Q-Powder G Fine

Qパウダー G ファイン

- :: 通常の歯面清掃に適した、平均粒径:65um
- :: ソフトな研磨効果によって得られる滑沢な仕上がり
- :: 軽微なステイン除去、複雑な矯正装置周辺の清掃

Qパウダー G ファイン

標準価格:6,400円(200g)
一般的名称:歯面研磨材 届出番号:13B1X00005000228(一般医療機器)
製造販売元:株式会社ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9



Q-Powder G Extra Fine

Qパウダー G エクストラファイン

- :: ファインよりきめ細やかな、平均粒径:25um
- :: ソフトな研磨効果でプラーク、バイオフィルムを除去
- :: 敏感な歯肉付近、インプラント周辺部の清掃

Qパウダー G エクストラファイン

標準価格:4,800円(120g)
一般的名称:歯面研磨材 届出番号:13B1X00005000228(一般医療機器)
製造販売元:株式会社ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9

主成分 グリシンについて

グリシンとは
○アミノ酸の一種です。
○非常に高い水溶性を持ち合わせています。
○食品にも広く用いられている物質です。
○グリシン自体に甘みがあります。

象牙質よりも軟らかい
グリシンは、エナメル質はもちろん象牙質よりもモース硬度が低く、軟らかいという特性があります。

材質	モース硬度	主成分
グリシン	~2	グリシン
象牙質	2~2.5	Qパウダー G ファイン
炭酸水素ナトリウム	2.5	Qパウダー G エクストラファイン
エナメル質	4~5.0	グリシン



家族の笑顔は、
健康的な白い歯から。

QUICK JET

歯面清掃器 | クイックジェット

塩辛くないパウダーだから、
大人も子どもも安心して使用することができます。



※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。表示価格は2019年4月現在。

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで

ヨシダ取扱製品に関するお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

0120-178-148

※対応時間 / 月~金 9:00~19:00 ± 9:00~17:00
(日曜・祝祭日を除く)





健康的な“白い歯”は、すべてを“笑顔”にさせる。

～新たに広がるクイックジェットの可能性～

頑固に付着したステイン・小窩裂溝の清掃には、
Qパウダー G ファイン/Qパウダーレモン・オレンジで効率よく除去。



舌側面のステイン除去



小窩裂溝のステイン除去



歯面清掃器
クイックジェットM

ハンディタイプで設置も簡単。
豊富なカラーバリエーションで医院を彩ります。

クイックジェットのジェットストリームの力で、歯面の汚れを効果的に除去。

パウダーは、主成分をグリシンとするQパウダー G「ファイン」と「エクストラファイン」および
症例に応じて、炭酸水素ナトリウムを主成分としたQパウダー「レモン」と「オレンジ」の4種類をご用意。
歯面清掃に新たな可能性が広がりました。



歯科医院の“トータルケア”で、患者さんに安心と信頼を。

デリケートな歯肉辺縁も、Qパウダー G エクストラファインなら
歯肉を傷つけにくく、より確実にプラーク除去。



歯頸部のプラーク除去



矯正装置周辺の清掃(術後)



歯肉炎の患者さんの清掃(術後)



歯面清掃器
クイックジェットS

エアと水量が調整可能。
細やかに患者さんに合わせられます。

タービンジョイントに簡単接続



タービンホースに接続できるため、タービン感覚で手軽に
クリーニングが行えます。

操作性が高く、無駄のないデザイン



パウダー収納部を上部にデザインすることで操作性が
向上。保持角度が変わってもパウダーが均一に噴射
されます。

洗浄パワーがアップ



ノズルの穴が小さくピンポイントで噴射でき、短時間で効
率よくクリーニング可能。またヘッド部が回転するため、本
体を持ち変えることなくクリーニングが行えます。



カラーバリエーション



アイボリー スカイブルー ミントグリーン ブラック

ハンドピース寸法 193mm
本体重量 132g(パウダー別)
パウダー消費量 4g/min(手元圧0.4MPa時)
空気消費量 10L/min(手元圧0.4MPa時)
水流量 40mL/min
セット内容 クイックジェットM1台 Qパウダーレモン(10g×36袋)
クリーニングワイヤー1本 ヘッド部Oリング(予備)1個
パッキン(予備)1個 Qドレープ3枚



本体寸法 W135×D120×H128mm
ハンドピース寸法 160×16mm(ジョイント部含む)
本体重量 1.2kg
使用空気圧 0.18~0.22MPa
使用水圧 0.1~0.2MPa
パウダー吐出量 1~2g/min(空気量最大時)

きめ細かな調整機能



[エア流量]と[水量]がそれぞれ調整可能。
微圧で歯頸部を洗浄できるので歯肉を傷つけ
ません。

[光付き][光無し]のどちらにも対応



[光付き][光無し]どちらのクイックジョイントを
装備したユニットにも対応できます。

着脱可能なハンドピース



ハンドピース部分が着脱できるので、滅菌処理
(135℃)や超音波洗浄が可能。また、クイックジョ
イントを採用しているため、着脱が簡単にできます。

頑固なステイン除去に。

Qパウダー レモン
(10g×36袋)
標準価格:4,300円



Qパウダー オレンジ
(10g×36袋)
標準価格:4,300円



パウダー飛散防止に。

Qドレープ(50枚入)
クイックジェット用穴あきドレープ
標準価格:4,800円

