


長期休み前後の機器のお手入れ

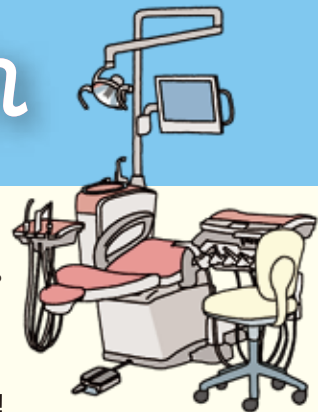

ご使用いただいておりますヨシダ製品をお休み明けにも快適にご使用いただくために。「日常点検」と「下記項目の点検」を長期休みの前後に実施して頂きますようお願い致します。

お休み前に実施すること

□実施したらチェックをしましょう!

① ユニット

- ヨシダスプレーでタービン・マイクロモーターハンドピースへ注油。(チャック部とジョイント部)

ヨシダスプレー▶



- アクリルカバー（無影灯前面樹脂製カバー）は、水を含ませた布で汚れを取り除いてから乾いた布で水分を拭き取ってください。
- 無影灯反射鏡は、水を含ませ固く絞った柔らかい布で汚れを取り除いてから乾いた布で水分を拭き取ってください。
- スピットンのゴミと、排水トラップの清掃。
- スピットンの排水口に 1 分以上水を流した後、花王スピットンクリーナーで洗浄*。(ゴミ受けは外す)
*正しい使用方法に従ってご使用ください。

花王スピットンクリーナー▶



- 専用ボールを使用し、バキュームと排唾管に、バイオクリーン希釈液を吸引させて洗浄。

バイオクリーン▶



- バキュームフィルターの清掃。
- ユニポアの汚れ具合を確認。
[交換目安：6 ヶ月]



▲ユニポアがこのような色になったら交換時期です。

- 一度ユニットチェアを最高位まで上昇させる。
- ユニットチェアを最低位に戻す。(リセット)
- メインスイッチを OFF にする。
- 水とエアーの元栓を閉め、シリンジで水・エアーの残圧を抜く。

② レントゲン

- パノラマレントゲンを最低位に下げる。
- レントゲンの電源を OFF にする。
- レントゲン室のドアを開けておく。



3Dレントゲン▶

③ 画像サーバー・カルテコンサーバー

- データバックアップ作業が完了しているか確認する。
(詳しくはヨシダ担当者にお問い合わせください)



④機械室

- コンプレッサー・エアドライヤー・バキュームの電源を OFF にする。
- コンプレッサーのオイル量と汚れを確認。(オイルレスコンプレッサーは除く)
⇒既定位置まで入っていない場合はオイルを注入。
⇒汚れている場合は、オイルを交換。(メーカーに依頼)
- コンプレッサーのタンクのエアーを抜く。
(ドレインコックまたは元圧コックを開く)
※オートエアトラップで抜ける場合は必要ありません。
- バキューム分離器の清掃。



分離器▶



▲オイルゲージ

⑤滅菌器 (オートクレーブ)

- メインスイッチを OFF にして、コンセントから電源コードを抜く。
- 貯水槽・排水槽の水を抜く。
- 扉は少し開いた状態にする。

滅菌器 ▶



お休み後に実施すること

- ユニットを最高位まで上昇させてから、スピットンの水を出し続ける。(3分以上)
- トリプルシリンジ (Dr 側・アシスタント側) から水を出す。
- ハンドピース類を装着する前に、タービン・マイクロモーターのホースから水を出し続ける。(約 1 分間)
- 上記が終了後、ハンドピース類を装着し、回転・チャックに異常がないか確認する。
- ユニットのメモリーを確認する。
- 滅菌器 (オートクレーブ) の給水タンクに給水して、試運転を行う。異常の際はメーカーに連絡。

医院もキレイにお掃除し
お休み後も快適に!



ご不明点等ございましたら弊社担当営業所までお問い合わせください。

株式会社 **ヨシダ** 東京都台東区上野 7-6-9

ヨシダ取扱製品に関するお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

0120-178-148

※対応時間 / 月~金 9:00~19:00 土 9:00~17:00
(日曜・祝祭日を除く)

●お問い合わせは下記まで